

Anwendungshinweise für Kesimpta® Sensoready® Pen

Es ist wichtig, dass Sie diese Anweisungen verstanden haben, bevor Sie sich Kesimpta injizieren, und diese befolgen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, wenn Sie Fragen haben, bevor Sie Kesimpta zum ersten Mal anwenden.

BITTE BEACHTEN:


- Verwenden Sie den Pen **nicht**, wenn das Siegel des Umkartons oder das Siegel des Pens beschädigt ist. Bewahren Sie den Pen im versiegelten Umkarton auf, bis Sie bereit für die Verwendung sind.
- Den Pen **nicht schütteln**.
- Den Pen **nicht verwenden**, wenn er beschädigt aussieht oder mit entfernter Kappe heruntergefallen ist.
- Entsorgen Sie den gebrauchten Pen sofort nach der Anwendung. **Den Pen nicht wiederverwenden**. Siehe "Wie soll ich den gebrauchten Kesimpta Sensoready® Pen entsorgen?" am Ende dieser Anwendungshinweise.

WIE SOLL ICH KESIMPTA AUFBEWAHREN?

- Bewahren Sie den Pen in der Verpackung im Kühlschrank zwischen 2°C und 8°C auf.
- Bewahren Sie den Pen in der Originalverpackung auf, um den Inhalt vor Licht zu schützen, bis Sie bereit für die Verwendung sind.
- Den Pen nicht einfrieren.

Bewahren Sie Kesimpta für Kinder unzugänglich auf.

BESTANDTEILE DES KESIMPTA SENSOREADY® PEN (siehe Abbildung A):

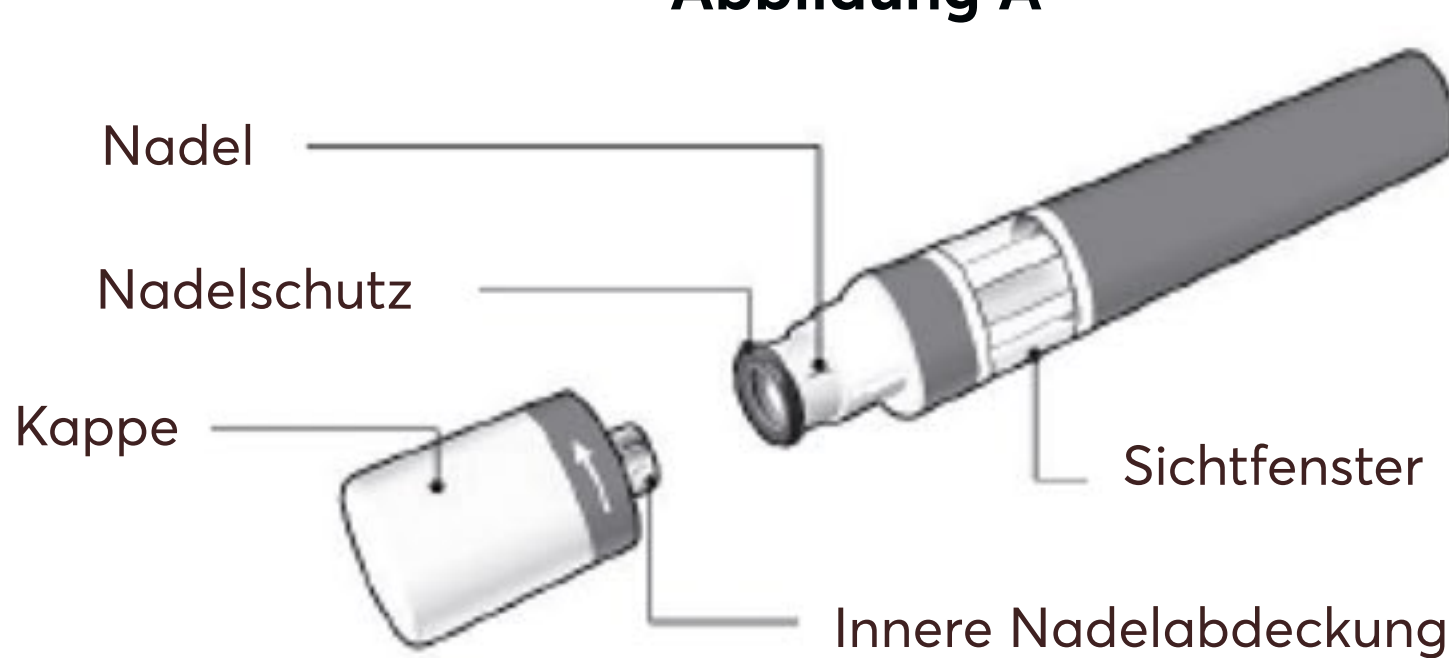


Der Kesimpta Sensoready® Pen ist mit entfernter Kappe gezeigt. Entfernen Sie die Kappe **erst**, wenn Sie für die Injektion bereit sind.

WAS SIE FÜR DIE INJEKTION BENÖTIGEN:

Im Umkarton enthalten:

- Ein neuer Kesimpta Sensoready® Pen (siehe Abbildung B)


Abbildung B

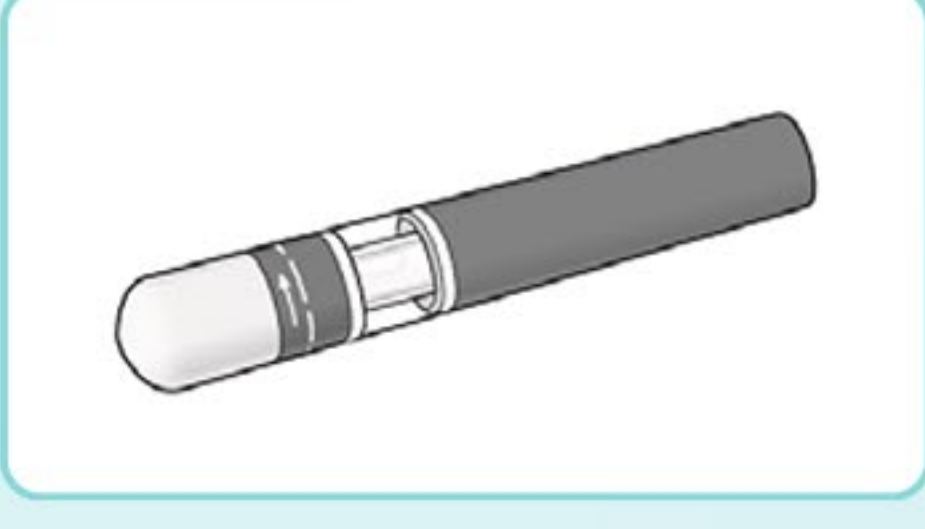

Im Umkarton nicht enthalten (siehe Abbildung C):

- 1 Alkoholtupfer
- 1 Wattebausch oder Mull
- Sicherheitsbehälter für die Entsorgung spitzer Gegenstände

Abbildung C

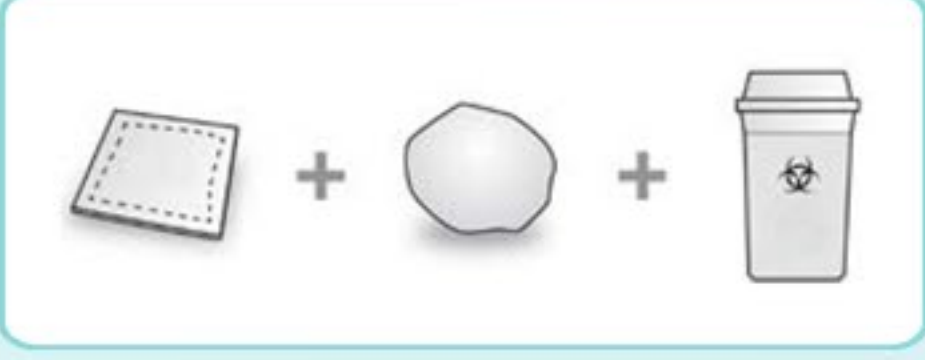

Siehe "Wie soll ich den gebrauchten Kesimpta Sensoready® Pen entsorgen?" am Ende dieser Anwendungshinweise.

VOR IHRER INJEKTION:

Nehmen Sie den Pen **15 bis 30 Minuten vor der Injektion** aus dem Kühlschrank, damit er Raumtemperatur annimmt.

Schritt 1: Wichtige Sicherheitskontrollen vor der Injektion (siehe Abbildung D):

- Schauen Sie durch das Sichtfenster. Die Flüssigkeit sollte klar bis leicht opaleszent sein.

Nicht verwenden, wenn die Flüssigkeit sichtbare Partikel enthält oder trübe erscheint.


Es könnte ein Luftbläschen zu sehen sein, was normal ist.

- Achten Sie auf das **Verfalldatum (EXP)** an Ihrem Pen.

Verwenden Sie den Pen **nicht**, wenn das Verfalldatum überschritten ist.

Wenden Sie sich an Ihren Apotheker oder medizinisches Fachpersonal, wenn der Pen eine dieser Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt.

Abbildung D

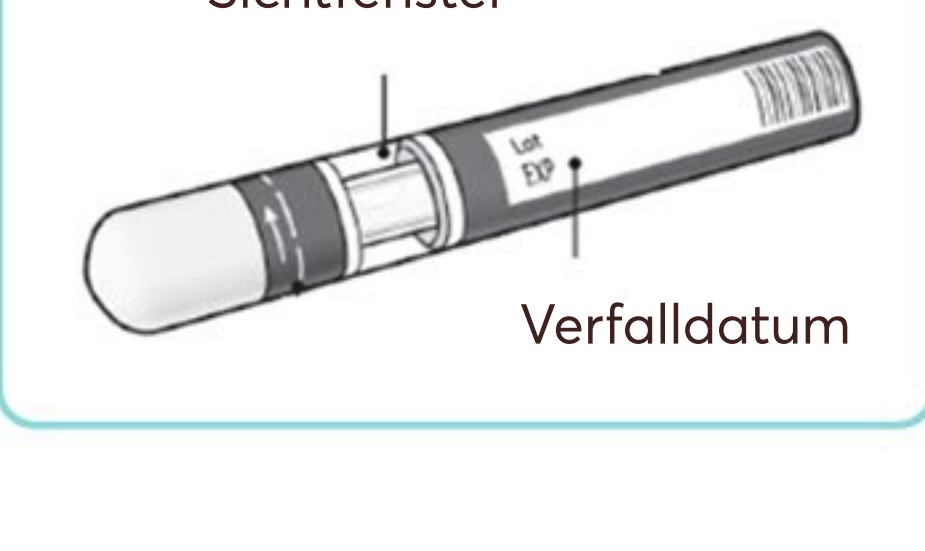

Schritt 2: Wählen Sie Ihre Injektionsstelle:

- Der empfohlene Bereich ist die Vorderseite der Oberschenkel. Sie können die Injektion auch im unteren Bauchbereich (Abdomen) vornehmen, **nicht** jedoch in einem Bereich von 5 cm um den Bauchnabel herum (siehe Abbildung E).

- Wechseln Sie bei jeder Injektion von Kesimpta die Injektionsstelle.

- **Nicht** an Stellen injizieren, an denen die Haut empfindlich, gerötet, schuppig oder hart ist oder einen Bluterguss aufweist. Bereiche mit Narben oder Dehnungsstreifen sowie infizierte Hautbereiche sind zu vermeiden.

- Falls ein **Betreuer** oder **medizinisches Fachpersonal** Ihnen die Injektion verabreicht, kann die Injektion auch an der Außenseite der Oberarme erfolgen (siehe Abbildung F).

Abbildung E


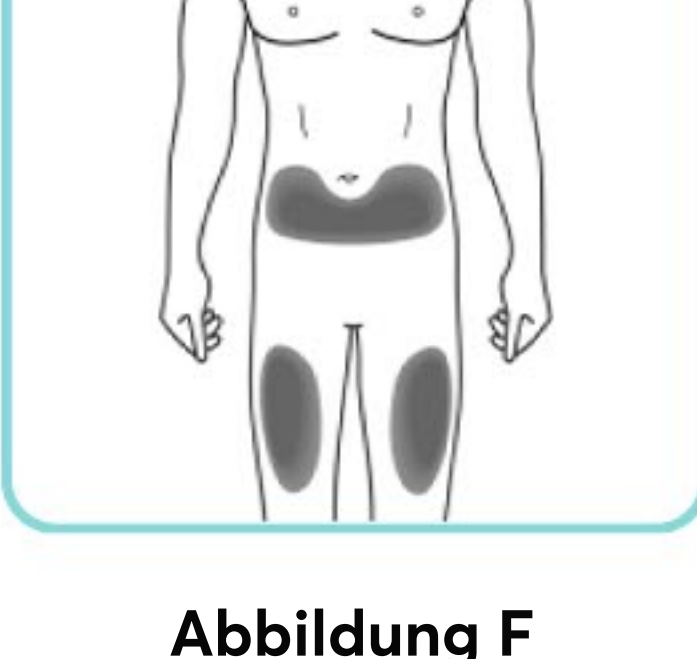


Abbildung F


(nur Betreuer und medizinisches Fachpersonal)

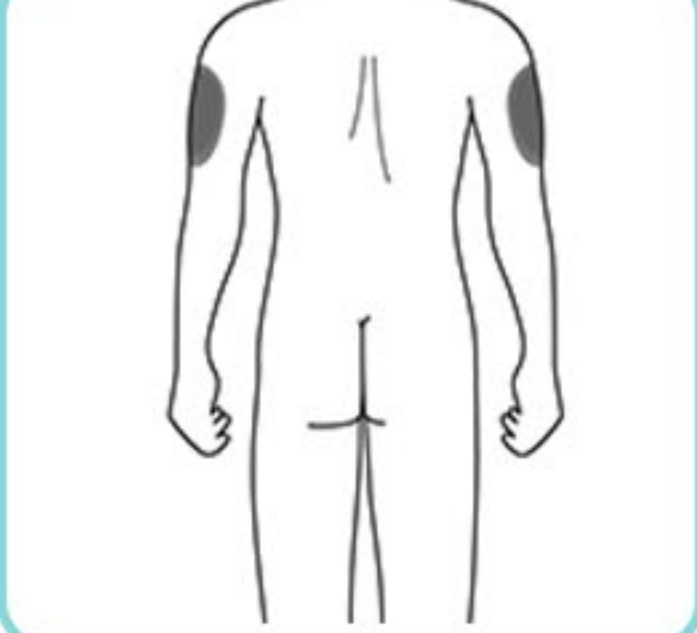

Schritt 3: Reinigen Sie die Injektionsstelle:

- Waschen Sie sich die Hände mit Wasser und Seife.
- Reinigen Sie die Injektionsstelle mit dem Alkoholtupfer mit einer kreisenden Bewegung. Lassen Sie die Stelle vor der Injektion trocknen (siehe Abbildung G).
- Achten Sie darauf, den gereinigten Bereich vor der Injektion nicht mehr zu berühren.

Abbildung G

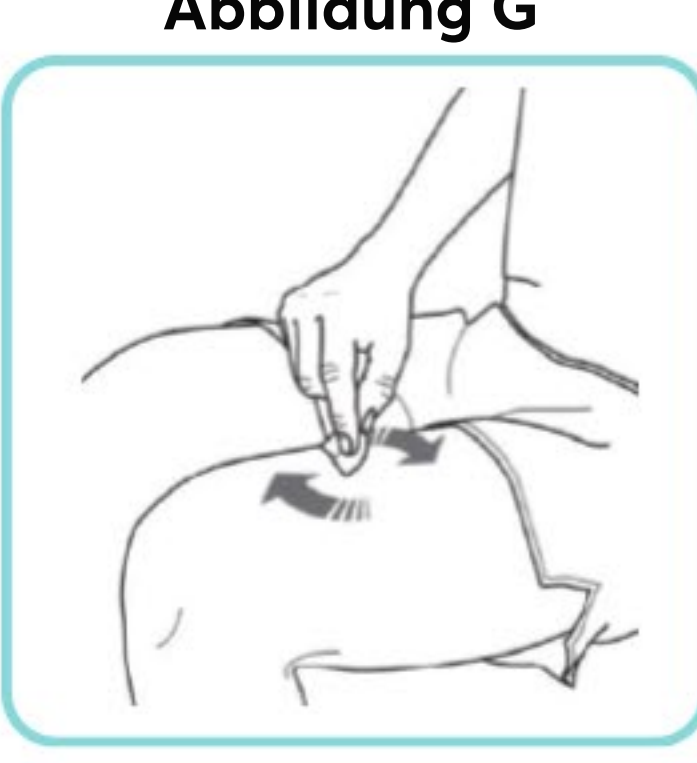


IHRE INJEKTION

Schritt 4: Entfernen Sie die Kappe:

- Entfernen Sie die Kappe erst, wenn Sie für die Anwendung des Pens bereit sind.
- Drehen Sie die Kappe in Pfeilrichtung ab (siehe Abbildung H).
- Werfen Sie die Kappe weg. **Versuchen Sie nicht, die Kappe wieder aufzusetzen.**
- Verwenden Sie den Pen innerhalb von 5 Minuten nach Entfernung der Kappe.

An der Nadelspitze können ein paar Tropfen Arzneimittel austreten. Dies ist normal.

Abbildung H

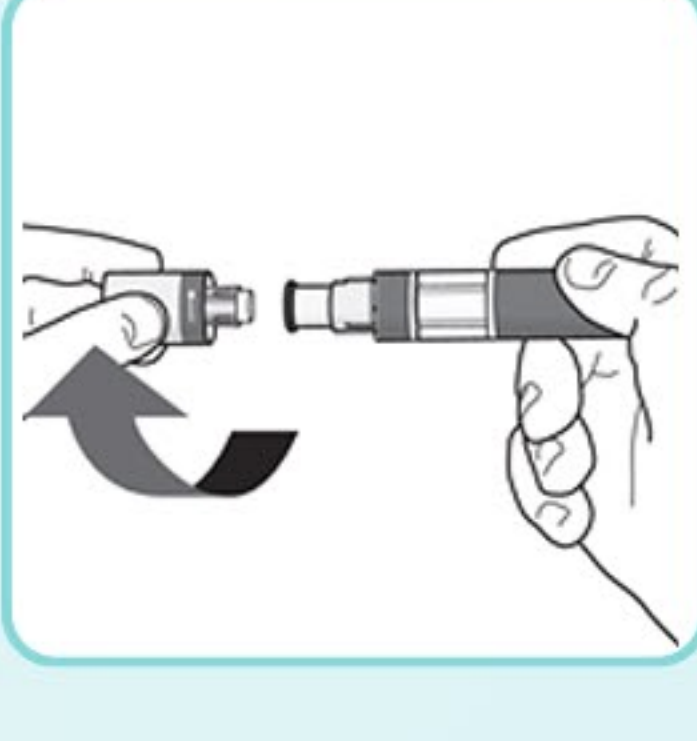

Schritt 5: So halten Sie den Pen:

- Halten Sie den Pen im 90 Grad-Winkel zur gereinigten Injektionsstelle (siehe Abbildung I).

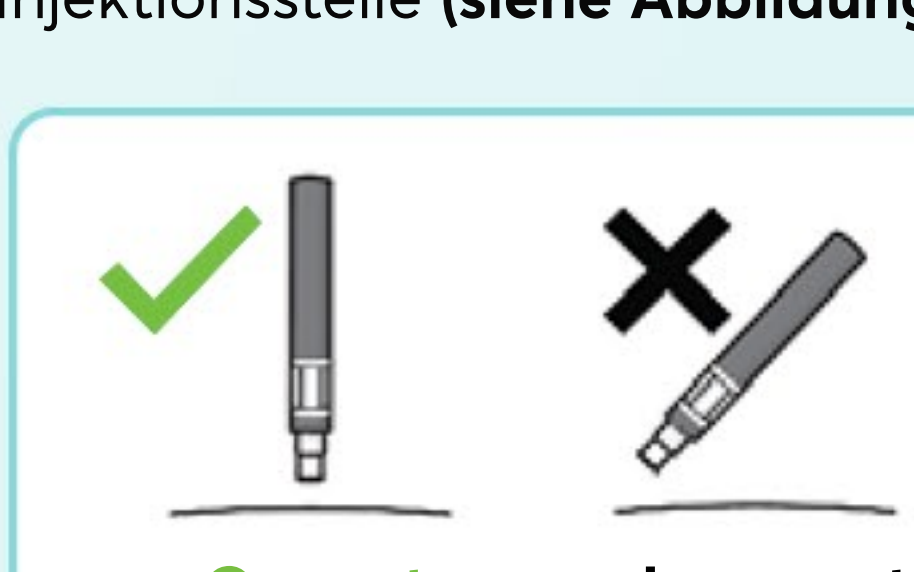


Abbildung I



Wichtig: Während der Injektion hören Sie 2 laute Klicks:


- Der **erste Klick** zeigt an, dass **die Injektion begonnen hat**.
- Der **zweite Klick** zeigt an, dass **die Injektion nahezu abgeschlossen ist**.

Sie müssen den Pen fest auf Ihre Haut gedrückt halten, bis der **grüne Indikator** das Fenster ausfüllt und sich nicht mehr bewegt.

Schritt 6: Beginnen Sie mit der Injektion:

- Drücken Sie den Pen fest auf Ihre Haut, um mit der Injektion zu beginnen (siehe Abbildung J).
- Der **erste Klick** zeigt an, dass die Injektion begonnen hat.
- **Halten Sie** den Pen fest auf Ihre Haut gedrückt.
- Der **grüne Indikator** zeigt den Fortschritt der Injektion.

Abbildung J

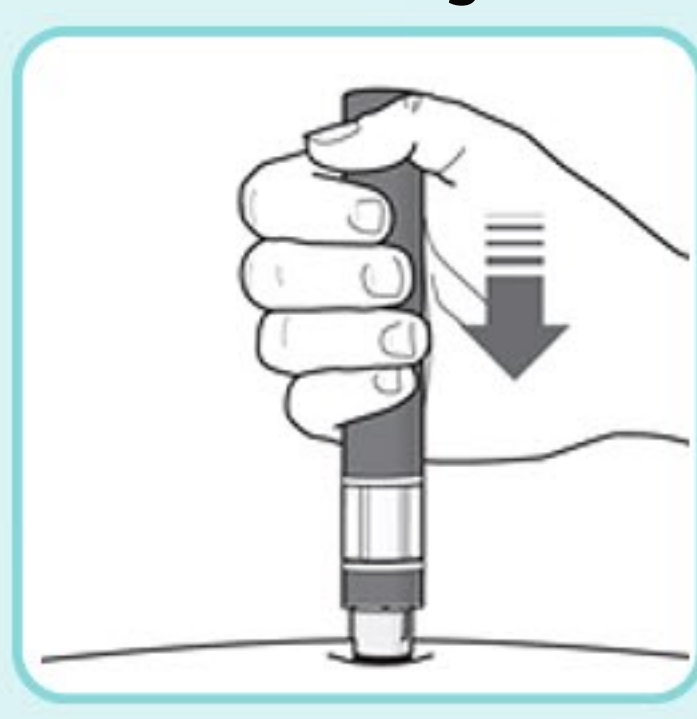

Schritt 7: Schließen Sie Ihre Injektion ab:

- Achten Sie auf den **zweiten Klick**. Dieser zeigt an, dass die Injektion **fast** abgeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der **grüne Indikator** das Fenster ausfüllt und sich nicht mehr bewegt (siehe Abbildung K).
- Sie können den Pen nun entfernen (siehe Abbildung L).

Abbildung K



Abbildung L



NACH IHRER INJEKTION:

- Wenn der grüne Indikator nicht das Fenster ausfüllt, bedeutet dies, dass Sie nicht die volle Dosis erhalten haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn der grüne Indikator nicht sichtbar ist.
- An der Injektionsstelle könnte etwas Blut austreten. Sie können mit einem Wattebausch oder Mull 10 Sekunden lang auf die Injektionsstelle drücken. An der Injektionsstelle nicht reiben. Falls es blutet, können Sie die Injektionsstelle mit einem kleinen Pflaster abdecken.

WIE SOLL ICH DEN GEBRAUCHTEN KESIMPTA SENSOREADY® PEN ENTSORGEN?

Schritt 8: Entsorgung Ihres Kesimpta Sensoready® Pens:

- Entsorgen Sie den gebrauchten Pen in einem Sicherheitsbehälter (d. h. verschließbarer, durchstichsicherer Behälter oder ähnlich) (siehe Abbildung M).
- Der Pen darf niemals wiederverwendet werden.

Bewahren Sie den Sicherheitsbehälter für Kinder unzugänglich auf.

Abbildung M

