

Upute za uporabu Kesimpta® Sensoready® brizgalice

Važno je da razumijete i slijedite ove upute za uporabu prije ubrizgavanja Kesimpte. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ako imate bilo kakvih pitanja prije nego što primijenite Kesimptu po prvi put.

ZAPAMTITE:


- **Ne upotrebljavajte** brizgalicu ako je potrzan kartonski spoj za evidenciju otvaranja na vanjskoj kutiji ili plastični spoj za evidenciju otvaranja na brizgalici. Čuvajte brizgalicu u neotvorenoj vanjskoj kutiji dok je niste spremni upotrijebiti.
- **Ne tresite** brizgalicu.
- Ako ispuštite brizgalicu, **ne upotrebljavajte** je ako brizgalica izgleda oštećeno ili ako ste je ispustili dok je poklopac bio uklonjen.
- Odložite brizgalicu odmah nakon uporabe. **Nemojte ponovo upotrijebiti brizgalicu.** Pogledajte "Kako trebam odložiti upotrijebljenu Kesimpta Sensoready brizgalicu?" na kraju ovih Uputa za uporabu.

KAKO TREBAM ČUVATI KESIMPTU?

- Čuvajte kutiju brizgalice u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C.
- Radi zaštite od svjetlosti čuvajte brizgalicu u originalnoj kutiji sve dok niste spremni za uporabu.
- **Nemojte zamrzavati** brizgalicu.

Čuvajte Kesimptu izvan pogleda i dohvata djece.

DIJELOVI KESIMPTA SENSOREADY BRIZGALICE (pogledajte Sliku A):

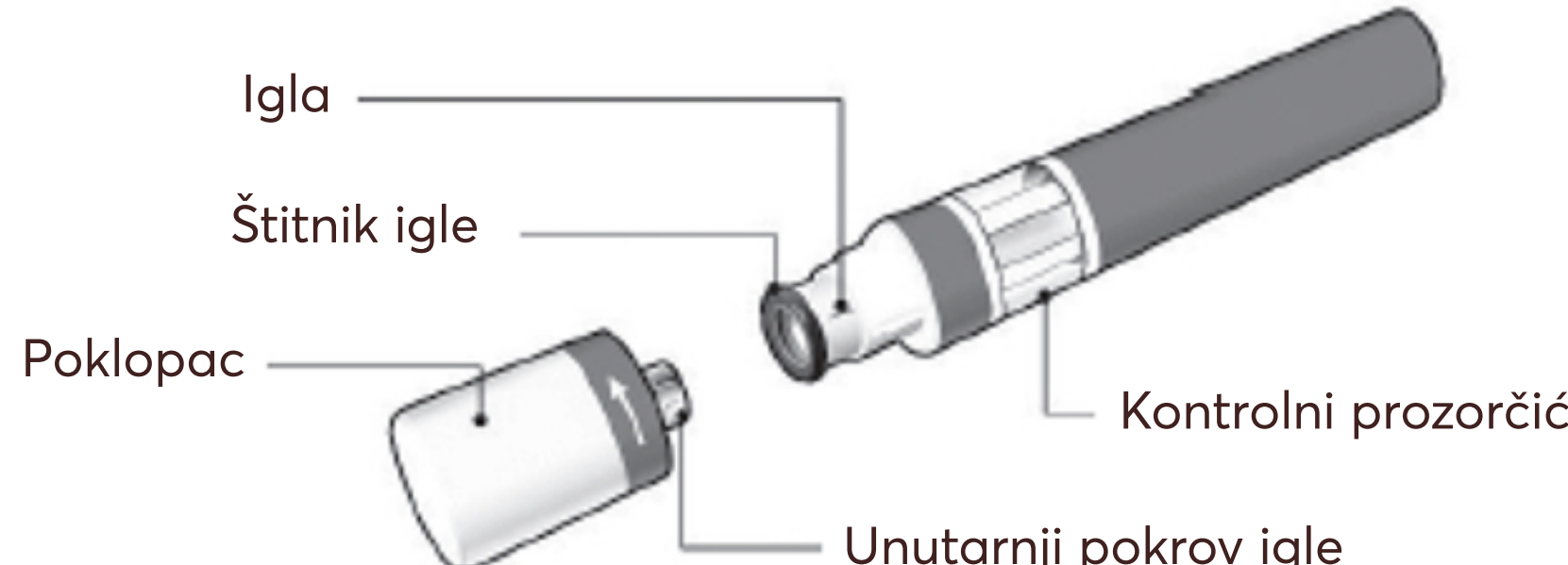


Kesimpta Sensoready brizgalica prikazana je sa skinutim poklopcem. **Nemojte** skidati poklopac dok niste spremni ubrizgati lijek.

ŠTO VAM TREBA ZA INJEKCIJU:

Uključeno u kutiju:

- Nova Kesimpta Sensoready brizgalica (**pogledajte Sliku B**)

Slika B

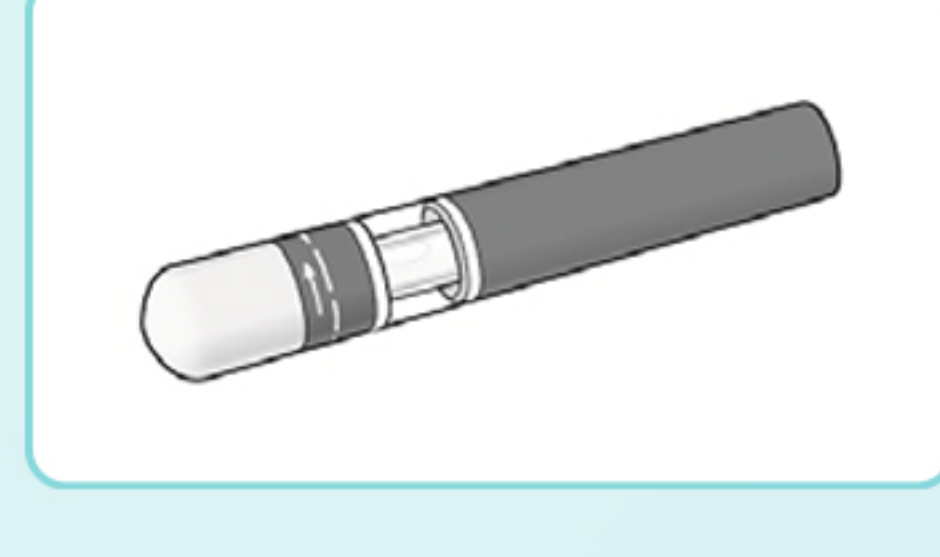

Nije uključeno u kutiju (**pogledajte Sliku C**):

- 1 alkoholni tufjer
- 1 pamučna vata ili gaza
- Spremnik za odlaganje oštih predmeta

Slika C



Pogledajte "Kako trebam odložiti upotrijebljenu Kesimpta Sensoready brizgalicu?" na kraju ovih Uputa za uporabu.

PRIJE INJEKCIJE:


Izvadite brizgalicu iz hladnjaka **15 do 30 minuta prije ubrizgavanja** kako bi mogla doseći sobnu temperaturu.

Korak 1. Važne sigurnosne provjere prije nego što si date injekciju (pogledajte Sliku D):

- Pogledajte kroz kontrolni prozorčić. Tekućina treba biti bistra do blago opalescentna. **Ne upotrebljavajte** ako tekućina sadrži vidljive čestice ili ako je zamućena. Možda ćete vidjeti mjehurić zraka, što je normalno.
- Pogledajte **rok valjanosti (EXP)** na brizgalici. **Ne upotrebljavajte** brizgalicu ako je istekao rok valjanosti.

Obratite se svom ljekarniku ili zdravstvenom radniku ako brizgalica ne prođe bilo koju od ovih provjera.

Slika D

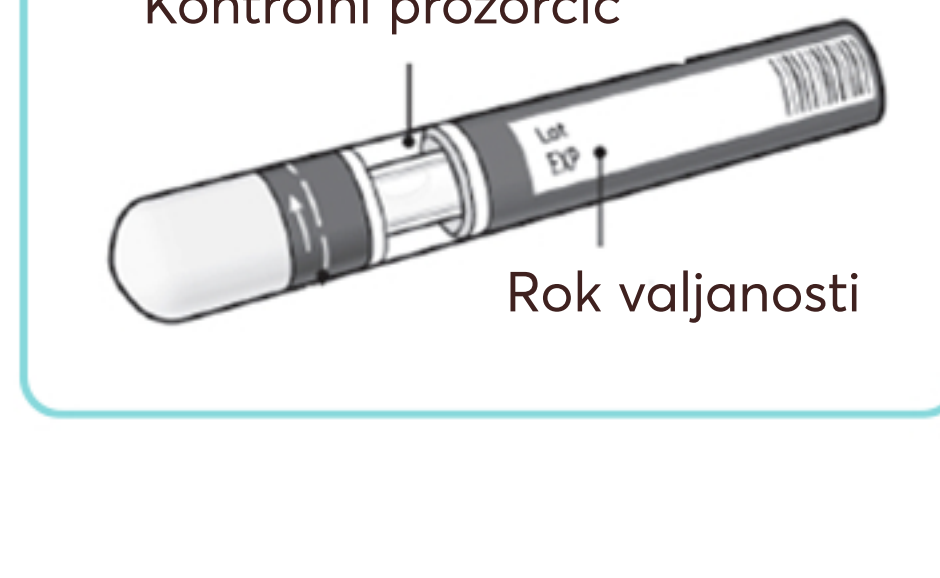

Korak 2. Odaberite mjesto primjene injekcije:


- Preporučeno mjesto je prednja strana bedara. Možete iskoristiti i donji dio trbuha (donji abdomen), ali **ne** područje 5 cm oko pupka (**pogledajte Sliku E**).
- Odaberite drugo mjesto svaki put kada si dajete injekciju Kesimpte.
- **Nemojte ubrizgavati** u područja na kojima je koža osjetljiva, s modricama, crvena, ljuskasta ili tvrda. Izbjegavajte područja s ožiljcima ili strijama ili mjesta infekcije.
- Ako Vam **njegovatelj ili zdravstveni radnik** daju injekciju, mogu Vam je dati i u vanjski dio nadlaktice (**vidjeti Sliku F**).

Slika E



Slika F

(samo za njegovatelje i zdravstvene radnike)

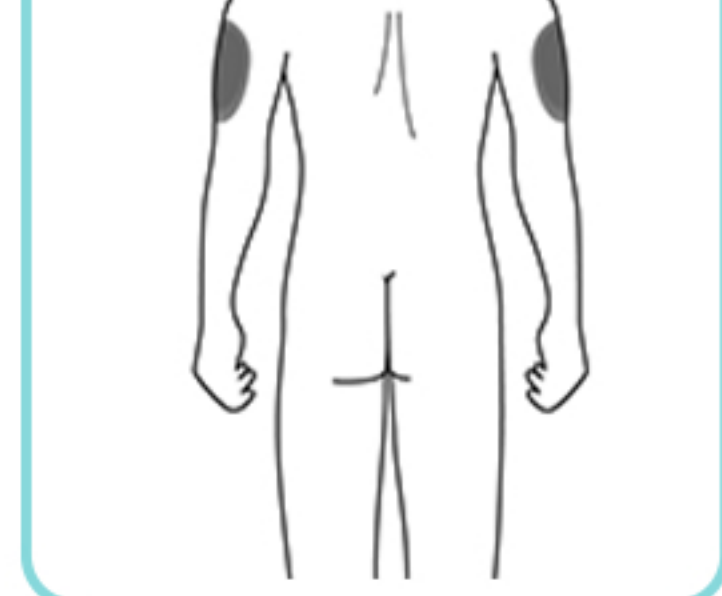

Korak 3. Očistite mjesto primjene injekcije:

- Operite ruke sapunom i vodom.
- Kružnim pokretima očistite mjesto primjene alkoholnim tufferom. Pustite da se osuši prije primjene injekcije (**pogledajte Sliku G**).
- Ne dirajte ponovo očišćeno područje prije primjene injekcije.

Slika G




VAŠA INJEKCIJA

Korak 4. Skinite poklopac:

- Skinite poklopac tek kad ste spremni upotrijebiti brizgalicu.
- Poklopac skinite okretom u smjeru strelice (**pogledajte Sliku H**).
- Odložite poklopac. **Ne pokušavajte ponovo staviti poklopac.**
- Upotrijebite brizgalicu u roku od 5 minuta nakon što skinete poklopac.

Možda ćete vidjeti nekoliko kapljica lijeka kako izlazi iz igle. To je normalno.


Slika H

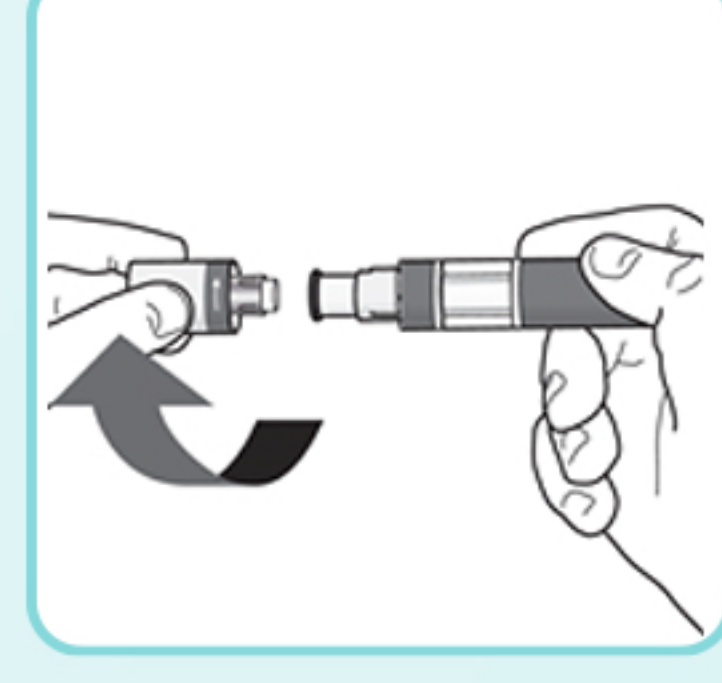

Korak 5. Primite brizgalicu:

- Držite brizgalicu pod kutem od 90 stupnjeva u odnosu na očišćeno mjesto primjene (**pogledajte Sliku I**).

Slika I

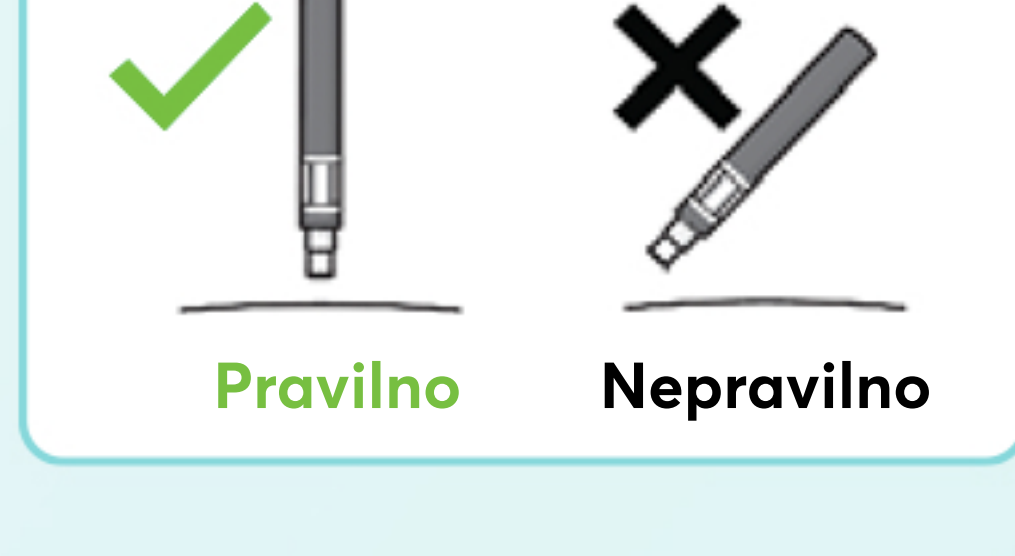

Važno: Tijekom injekcije čut ćete 2 glasna klika:


- **Prvi klik** označava da je **injekcija započela**.
- **Drugi klik** označava da je **injekcija skoro gotova**.

Morate i dalje držati brizgalicu čvrsto pritisnuta na kožu dok ne vidite da je **zeleni indikator** ispunio prozorčić i prestao se micati.


Korak 6. Započnite injekciju:

- Pritisnite brizgalicu čvrsto na kožu da biste započeli injekciju (**pogledajte Sliku J**).
- **Prvi klik** označava da je injekcija započela.
- **Nastavite držati** brizgalicu čvrsto pritisnuta na kožu.
- **Zeleni indikator** pokazuje napredovanje injekcije.

Slika J

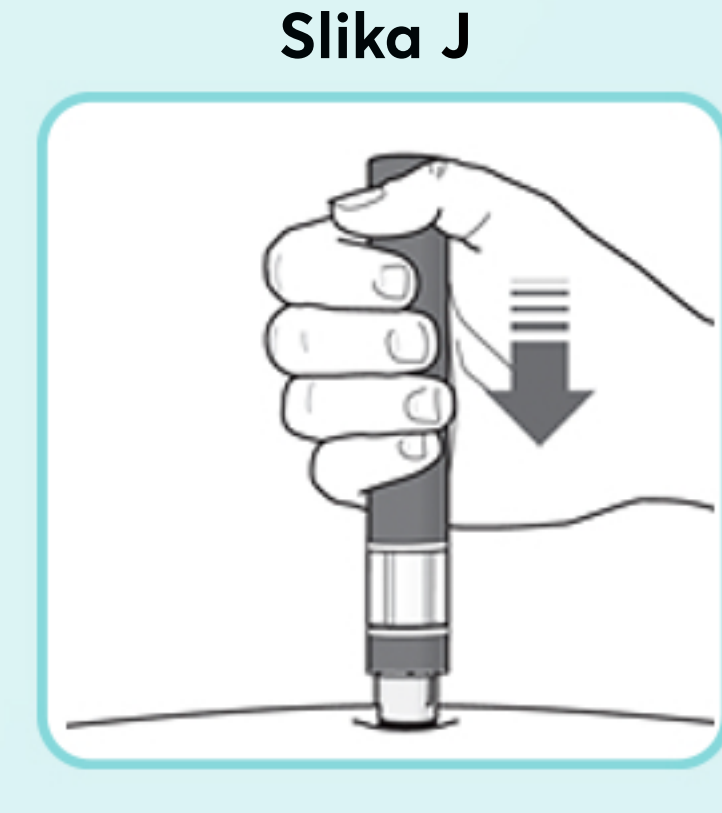

Slika K

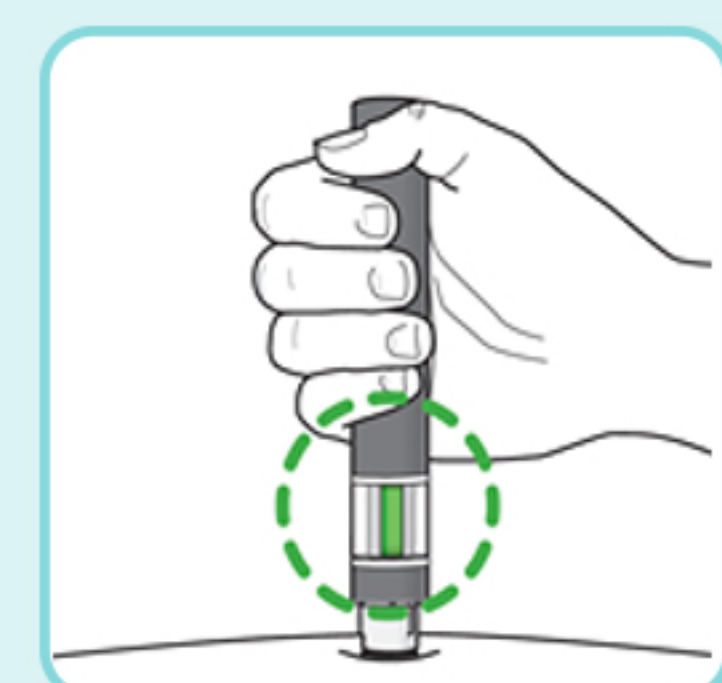

Slika L



NAKON INJEKCIJE:

- Ako zeleni indikator ne ispunjava prozorčić, to znači da niste primili punu dozu. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako zeleni indikator nije vidljiv.
- Na mjestu primjene moglo bi biti malo krvi. Možete pritisnuti pamučnu vatu ili gazu na mjesto primjene i držati je 10 sekundi. Ne trljajte mjesto primjene. Možete pokriti mjesto primjene malim flasterom ako se krvarenje nastavi.

KAKO TREBAM ODLOŽITI UPOTRIJEBLJENU KESIMPTA SENSOREADY BRIZGALICU?

Korak 8. Odložite Kesimpta Sensoready brizgalicu:

- Odložite upotrijebljenu brizgalicu u spremnik za odlaganje oštih predmeta (tj. spremnik koji se može zatvoriti i otporan je na probijanje, ili nešto slično) (**pogledajte Sliku M**).
- Nikada nemojte pokušavati ponovo upotrijebiti svoju brizgalicu.

Čuvajte spremnik za oštre predmete izvan dohvata djece.

Slika M

