

A Kesimpta® Sensoready® injekciós toll használati utasítása

Fontos, hogy a Kesimpta injekció beadása előtt megértse és kövesse ezeket az utasításokat. Ha bármilyen kérdése lenne a Kesimpta első alkalmazása előtt, beszéljen kezelőorvosával, gyógyszerészével vagy a gondozását végző egészségügyi szakemberrel.

NE FELEDJE:


- **Ne használja fel** az injekciós tollat, ha akár a külső dobozon, akár a injekciós toll csomagolásán a zárjegy sérült! Tartsa az injekciós tollat a zárjeggyel lezárt külső dobozban addig, amíg készen nem áll az injekciós toll felhasználására.
- **Ne rázza fel** az injekciós tollat!
- Ha elejti az injekciós tollat, **ne használja fel**, ha láthatóan megsérült, vagy ha a védőkupak nélkül ejtette le.
- Beadás után azonnal dobja ki a használt injekciós tollat! **Ne használja fel egynél többször ugyanazt az injekciós tollat!** Olvassa el a „Hogyan kell ártalmatlanítani a használt Kesimpta Sensoready injekciós tollat?” részt a használati utasítás végén.

HOGYAN TÁROLJAM A KESIMPTA-T?

- Az injekciós toll dobozát hűtőszekrényben, 2 °C és 8 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.
- A fénytől való védelem érdekében tartsa az injekciós tollat az eredeti dobozában addig, amíg készen nem áll a fecskendő felhasználására.
- **Ne fagyassza** le az injekciós tollat!

A Kesimpta gyermekektől elzárva tartandó!

A KESIMPTA SENSOREADY INJEKCIÓS TOLL RÉSZEI (lásd az „A” képen):

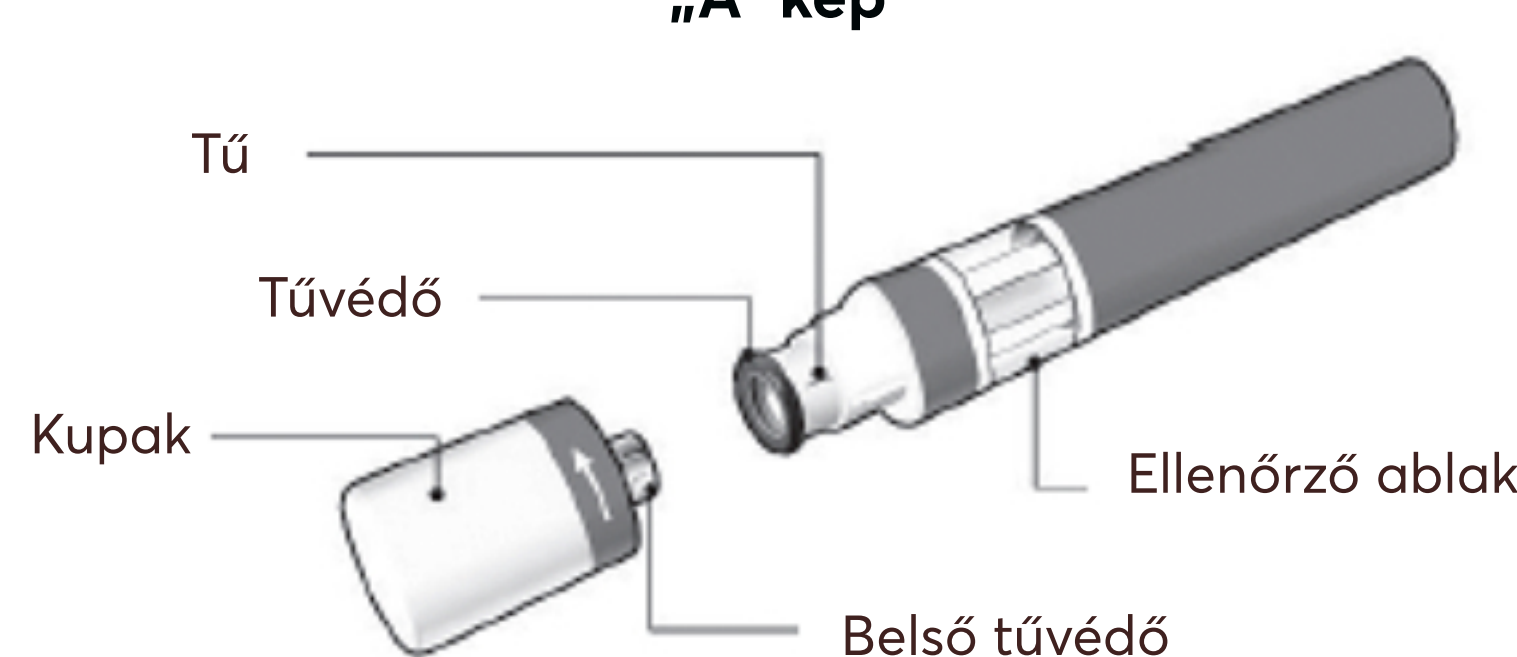


A Kesimpta Sensoready injekciós toll az eltávolított kupakkal látható a képen. **Csak akkor** vegye le a kupakot, amikor már készen áll az injekció beadására.

MIRE VAN SZÜKSÉGE AZ INJEKCIÓ BEADÁSÁHOZ?

A doboz tartalmazza:

- Egy új Kesimpta Sensoready injekciós toll (lásd a „B” képen)

„B” kép

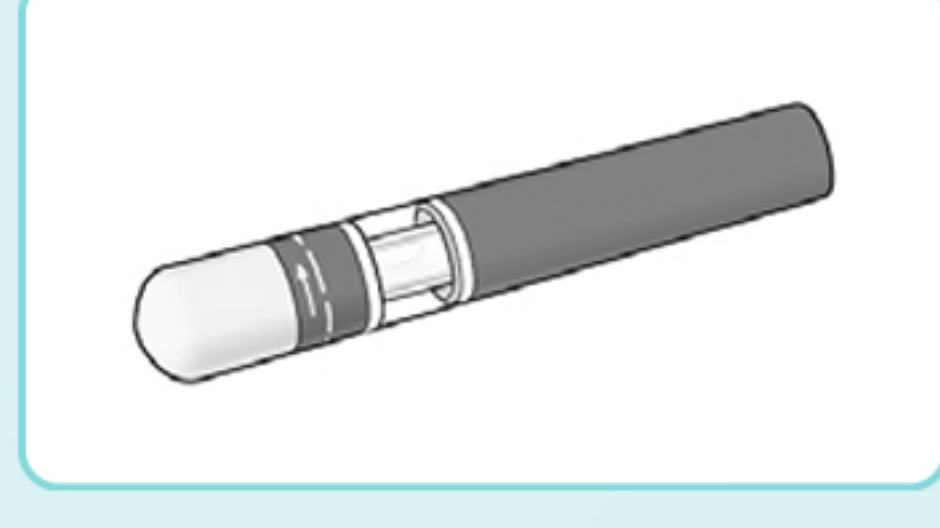

Nem tartalmazza a doboz (lásd a „C” képen):

- 1 alkoholos törlőkendő
- 1 vattapamacs vagy géz
- Éles, hegyes eszközök gyűjtésére szolgáló tartály

„C” kép



Olvassa el a „Hogyan kell kidobni a használt Kesimpta Sensoready injekciós tollat?” részt a használati utasítás végén.

AZ INJEKCIÓ BEADÁSA ELŐTT:

Vegye ki az előretöltött injekciós tollat a hűtőszekrényből körülbelül **15-30 perccel** az **injekció** beadása előtt, hogy legyen elég ideje szobahőmérsékletre melegedni.

1. lépés. Az injekció beadása előtt elvégzendő fontos biztonsági ellenőrzések (lásd a „D” képen):

- Vizsgálja meg a gyógyszert az ellenőrző ablakon át. A folyadéknak tisztának vagy enyhén opálosnak kell lennie.

Ne használja fel, ha a folyadék látható szemcséket tartalmaz vagy ha homályos.

Egy kis légbuborékot is láthat, ami normális.

- Ellenőrizze az injekciós toll **lejárati idejét (EXP)**. A lejáratú időn túl **ne használja fel** az injekciós tollat.

Ha ezen ellenőrzési pontok bármelyikének nem felel meg az injekciós toll, forduljon gyógyszerészéhez vagy a gondozását végző egészségügyi szakemberhez.

2. lépés. Válassza ki az injekció beadási helyét:


- Az injekciót a comb elülső részébe javasolt beadni. Választhatja még a has alsó részét (a gyomor alatti területet) is, **kivéve** a köldök körülüli 5 cm-es területet (lásd az „E” képen)

- A Kesimpta minden beadásakor változtassa meg az injekció beadási helyét.


- **Ne adja be az injekciót** olyan helyre, ahol a bőr érzékeny, bevértett, vörös, hámlik vagy kemény! Kerülje azokat a területeket, ahol hegek vagy terhességi csíkok vannak, illetve ahol fertőzés van jelen.

- Ha egy **gondozó** vagy **egészségügyi szakember** adja be Önnek az injekciót, akkor ők beadhatják azt a felkar külső részébe is (lásd az „F” képen).


„D” kép

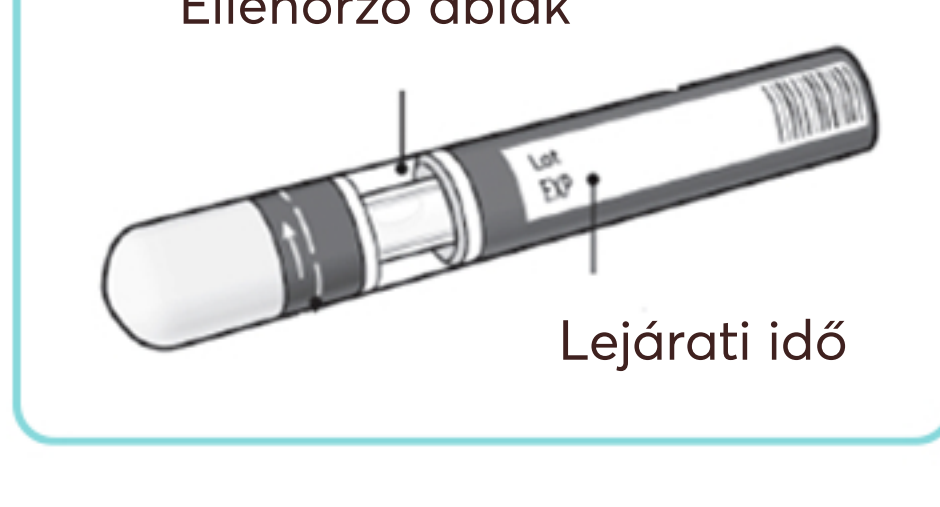


„E” kép

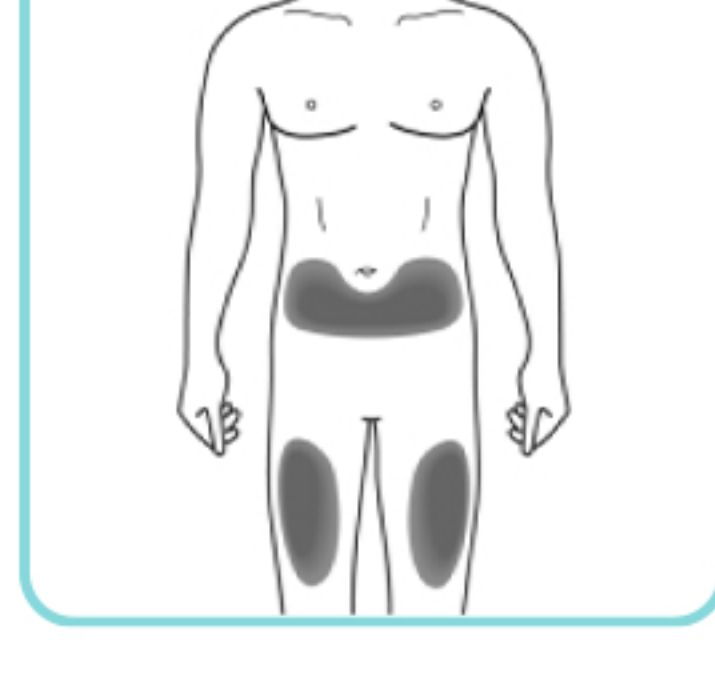

„F” kép
(kizárólag gondozóknak és egészségügyi szakembereknek)

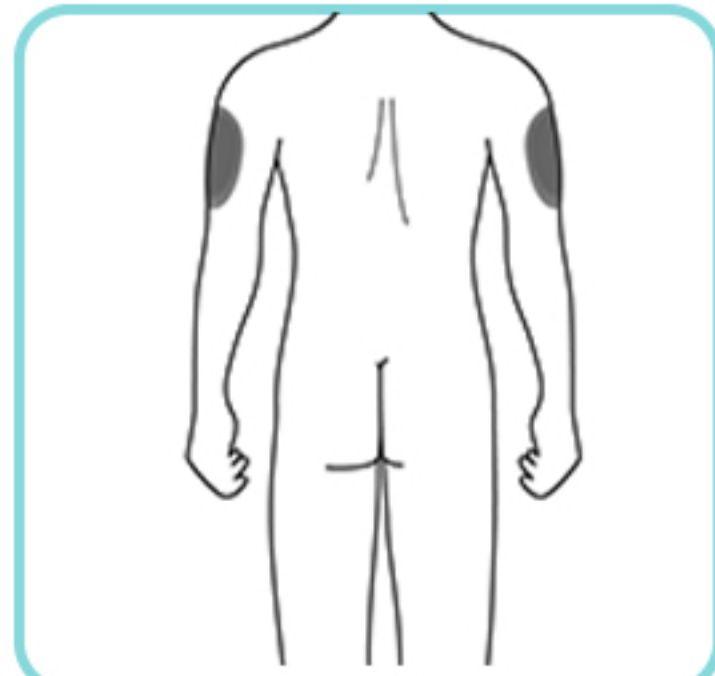

„G” kép

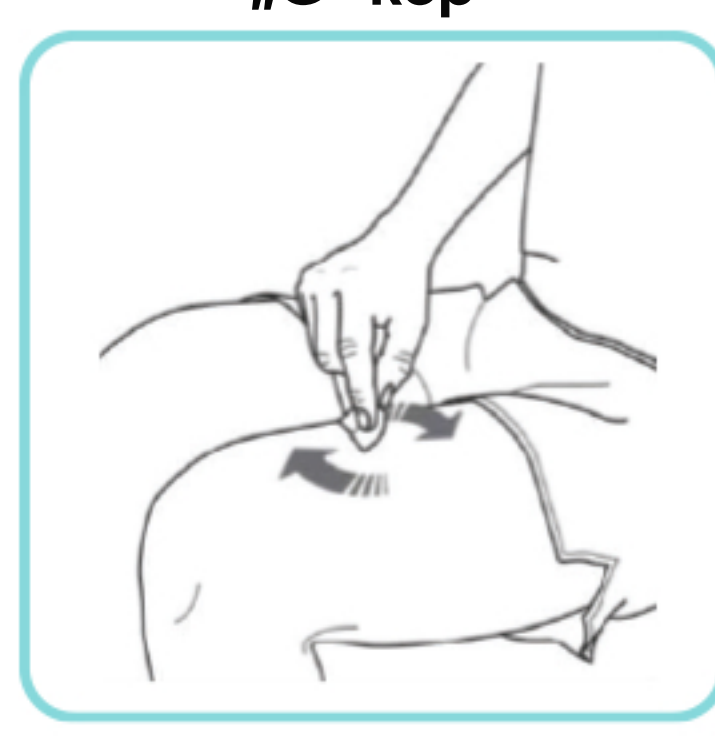

3. lépés. Tisztítsa meg az injekció beadási helyét:

- Mosson kezet szappanos vízzel.
- Körkörös mozdulatokkal tisztítsa meg az injekció beadási helyét alkoholos törlővel. Beadás előtt hagyja megszáradni (lásd a „G” képen).
- A tisztítás után az injekció beadásáig már ne érintse meg ezt a területet!


HOGYAN ADJA BE MAGÁNAK AZ INJEKCIÓT

4. lépés. Vegye le a kupakot:


- Csak akkor vegye le a kupakot, amikor már készen áll az injekciós toll használatára.
- A nyíl irányában csavarja le a kupakot (lásd a „H” képen).
- Dobja ki a kupakot. **Ne próbálja meg visszarakni a kupakot!**
- A kupak eltávolítása után 5 percen belül használja fel az injekciós tollat!

Lehetséges, hogy néhány csepp gyógyszer kiszivárog a tűből. Ez normális jelenség.

„H” kép

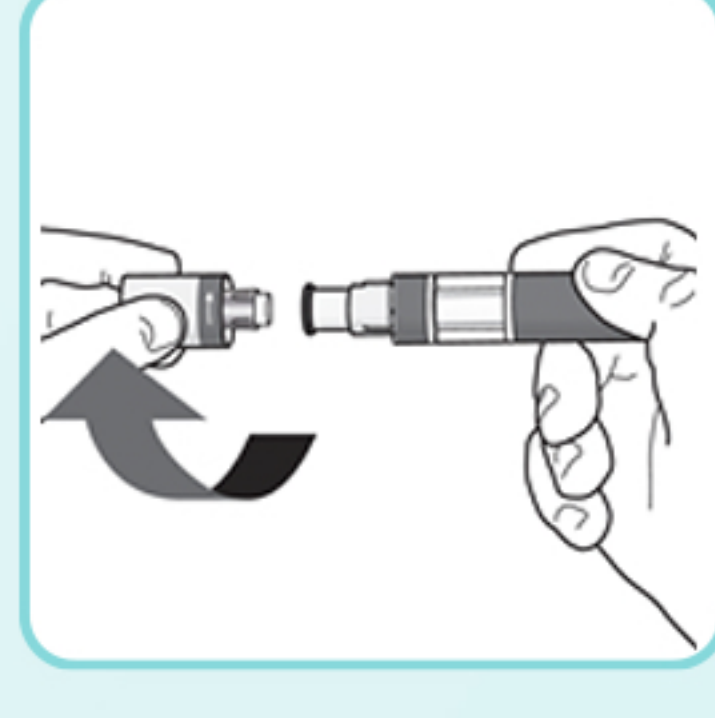

„I” kép

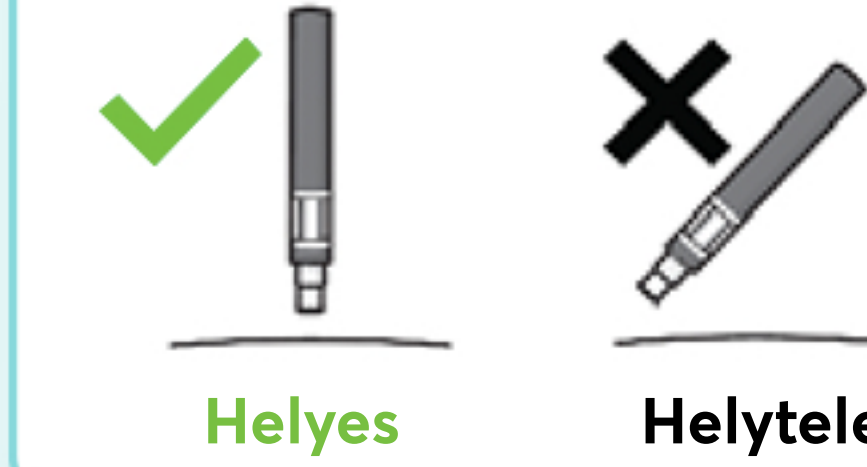

Fontos: Az injekció beadása közben 2 hangos kattánást fog hallani:


- Az **első kattánás** azt jelzi, hogy **megkezdődött az injekció beadása**.
- A **második kattánás** azt jelzi, hogy **az injekció beadása majdnem befejeződött**.

Határozottan tartsa a bőréhez nyomva az injekciós tollat mindaddig, amíg azt nem látja, hogy a **zöld jelzés** kitölti az ellenőrző ablakot és megáll.

6. lépés. Az injekció megkezdése:

- Az injekció megkezdéséhez határozottan nyomja a bőréhez az injekciós tollat (lásd a „J” képen).
- Az **első kattánás** azt jelzi, hogy megkezdődött az injekció beadása.
- **Továbbra is határozottan nyomja** a bőréhez az injekciós tollat.
- A **zöld jelzés** azt mutatja, hogy áll az injekció beadása.

„J” kép

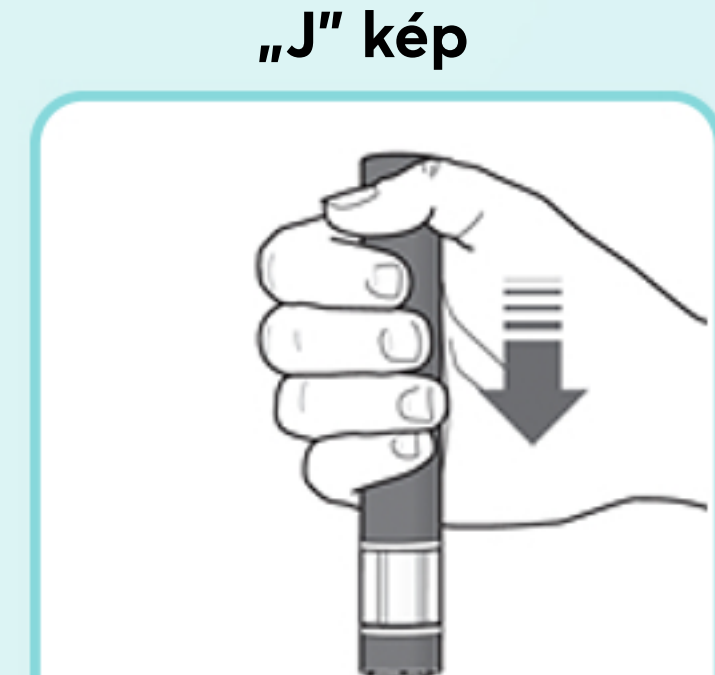

„K” kép



„L” kép



7. lépés. Az injekció befejezése:

- Figyeljen, hogy mikor hallja meg a **második kattánást**. Ez azt jelzi, hogy az injekció beadása **majdnem befejeződött**.
- Ellenőrizze, hogy a **zöld jelzés** betölti-e az ellenőrző ablakot és megállt-e (lásd a „K” képen).
- Most már elveheti az injekciós tollat (lásd az „L” képen).

HOGYAN KELL ÁRTALMATLANÍTANI A HASZNÁLT KESIMPTA SENSOREADY INJEKCIÓS TOLLAT?

8. lépés. Dobja ki a Kesimpta Sensoready injekciós tollat:

- Dobja ki a felhasznált injekciós tollat egy éles, hegyes eszközök gyűjtésére szolgáló tartályba (azaz szűrőbiztos, lezárható tartályba vagy hasonlóba) (lásd az „M” képen).
- Soha ne próbálja újra felhasználni az injekciós tollat!

Tartsa az éles, hegyes eszközök gyűjtésére szolgáló tartályt gyermekektől elzárva.

„M” kép

