

Kesimpta® Sensoready® Pen švirkštinio vartojimo instrukcijos

Prieš leidžiant Kesimpta svarbu suprasti ir laikytis šių vartojimo instrukcijų. Kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją, jeigu prieš pirmąjį Kesimpta vartojimą Jums kiltų kokių nors klausimų.

PRISIMINKITE:


- **Nenaudokite** švirkštinio, jeigu išorinės dėžutės apsauginis sluoksnis arba švirkštinio apsauga yra pažeisti. Laikykite švirkštinį sandarioje dėžutėje iki kol būsite pasiruošę vartoti vaisto.
- **Nepurtykite** švirkštinio.
- Jeigu numetėte švirkštinį, **nenaudokite** jo, jeigu švirkštiklis atrodo pažeistas arba jeigu numetėte jį su nuimtu dangteliu.
- Panaudotą švirkštinį reikia išmesti iškart po vartojimo. **Švirkštinio negalima naudoti pakartotinai.** Žiūrėkite šių Vartojimo instrukcijų pabaigoje esantį skyrelį „Kaip turėtumėte išmesti panaudotą Kesimpta Sensoready Pen švirkštinį?“.

KAIP TURĖTUMĖTE LAIKYTI KESIMPTA?

- Švirkštinio dėžutę laikykite šaldytuve (2 °C – 8 °C temperatūroje).
- Laikykite švirkštinį gamintojo pakuotėje iki pat vartojimo, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
- Švirkštinio **negalima užšaldyti**.

Laikykite Kesimpta vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

KESIMPTA SENSOREADY PEN ŠVIRKŠTINIO DALYS (žr. A pav.):

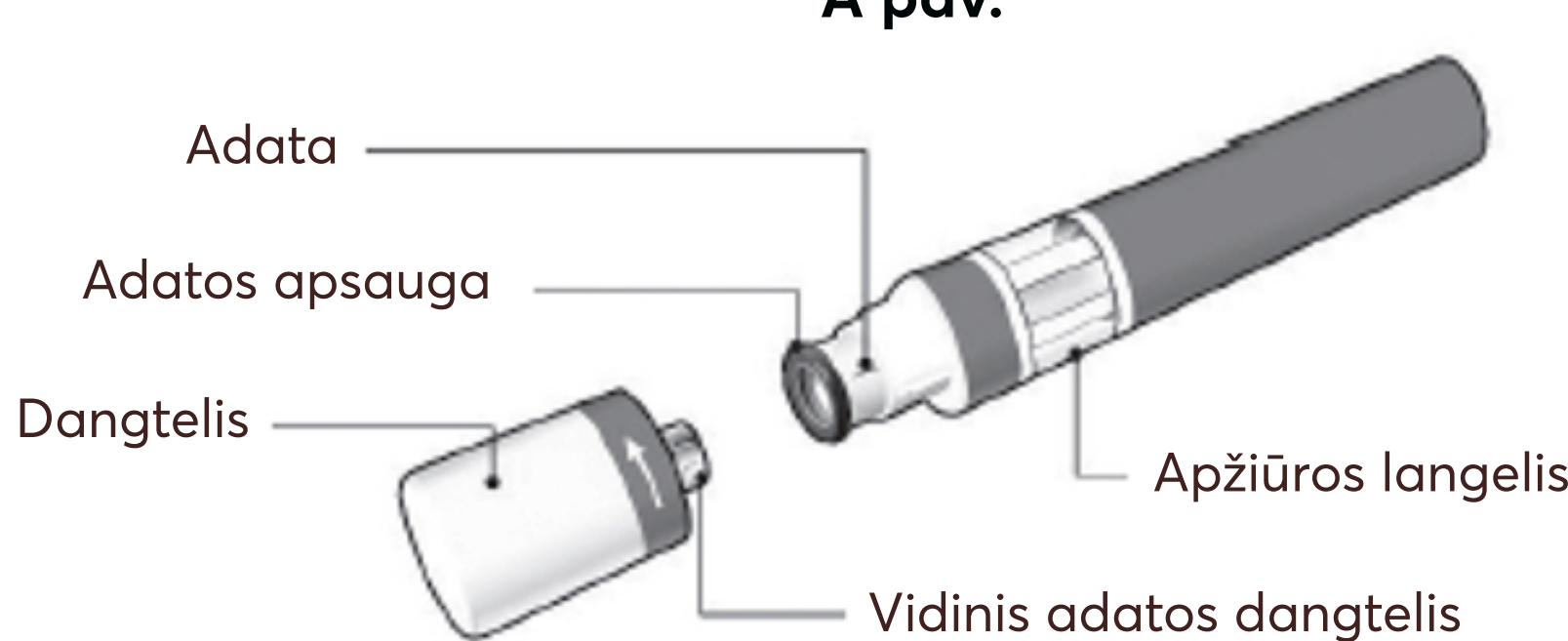


Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklis pavaizduotas su nuimtu dangteliu. **Nenuimkite** dangtelio, kol nebūsite pasiruošę atlikti injekcijos.

KO PRIREIKS INJEKCIJAI SULEISTI:

Dėžutėje yra:

- Naujas Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklis (žr. B pav.)

B pav.

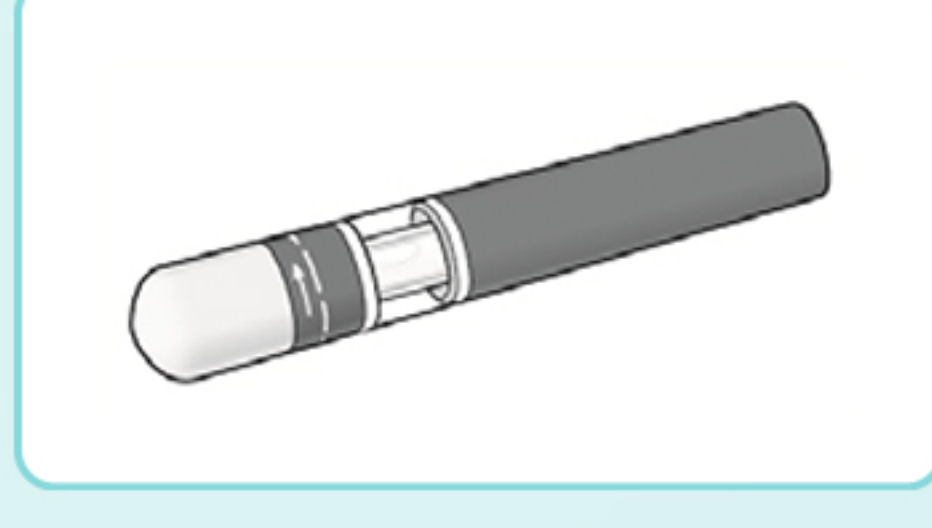

Dėžutėje nėra (žr. C pav.):

- 1 alkoholiu suvilgyto tampono;
- 1 medvilnės ar marlės gniužulėlio;
- aštriems daiktams skirtos talpyklės.

C pav.



Žiūrėkite šių Vartojimo instrukcijų pabaigoje esantį skyrelį „Kaip turėtumėte išmesti panaudotą Kesimpta Sensoready Pen švirkštinį?“.

PRIEŠ ATLIEKANT INJEKCIJĄ:

Švirkštinį išimkite iš šaldytuvo ir **15-30 minučių iki leidimo** leiskite sušilti iki kambario temperatūros.

1 veiksmas. Svarbūs saugumo patikrinimai prieš atliekant injekciją (žr. D pav.):


- Pažiūrėkite pro apžiūros langelį. Viduje esantis tirpalas turi būti skaidrus ar šiek tiek opalinis. **Nevartokite** vaisto, jeigu tirpale yra aiškiai matomų dalelių arba tirpalas yra drumstas. Tirpale galite pastebėti nedidelių oro burbuliukų, tai yra normalu.
- Patikrinkite švirkštinio **tinkamumo laiką (po „EXP“)**. **Nenaudokite** švirkštinio, pasibaigus tinkamumo laikui.

Kreipkitės į vaistininką arba sveikatos priežiūros specialistą, jeigu švirkštiklis neatitinka bent vienos iš šių sąlygų.


2 veiksmas. Pasirinkite injekcijos vietą:

- Rekomenduojamos injekcijų sritys yra priekiniai šlaunų paviršiai. Taip pat vaisto galite leisti į apatinę pilvo dalį, tačiau **negalima** leisti į 5 centimetrų plotą aplink bambą (žr. E pav.).
- Kiekvieną kartą leisdamiesi Kesimpta pasirinkite vis kitą odos sritį.
- **Nelieskite** tose srityse, kurių oda skausminga, pažeista, paraudusi, pleiskanojanti ar sukietėjusi arba kur yra kraujosruvų. Venkite tų odos sričių, kur yra randų ar strijų arba kurios apimtos infekcijos.
- Jeigu vaisto Jums leidžia **slaugytojas** ar **sveikatos priežiūros specialistas**, injekciją taip pat galima atlikti ir išorinėse žastų srityse (žr. F pav.).


D pav.

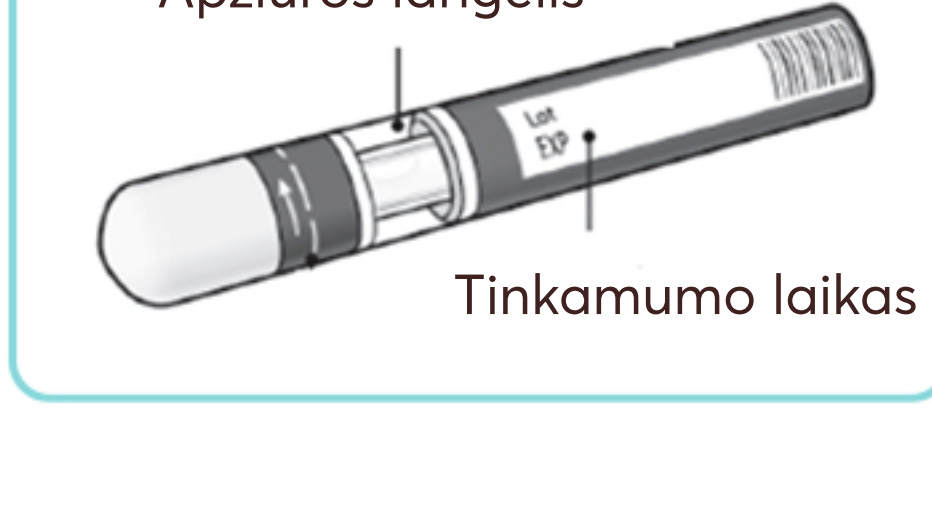

E pav.

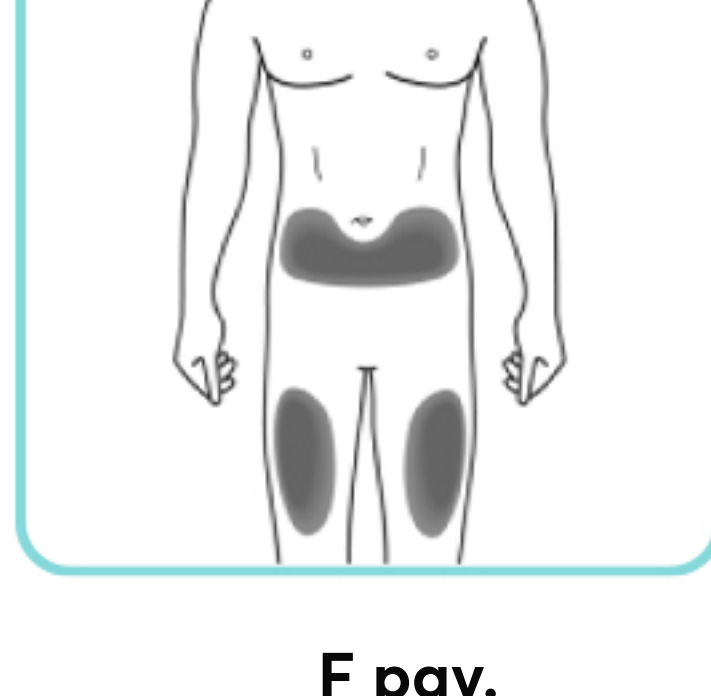


F pav.
(tik kai leidžia globėjas ar sveikatos priežiūros specialistas)

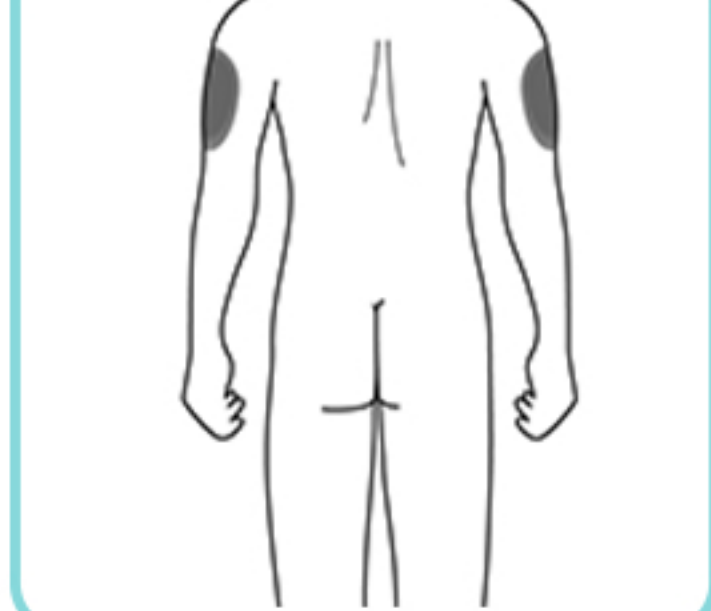

3 veiksmas. Nuvalykite injekcijos vietą:

- Kruopščiai nuplaukite rankas muilu ir vandeniu.
- Sukamaisiais judesiais nuvalykite injekcijos vietą alkoholiu suvilgytu tamponu. Prieš leisdami vaisto leiskite šiai vietai nudžiūti (žr. G pav.).
- Nelieskite šios nuvalytos vietos prieš leisdami vaisto.

G pav.

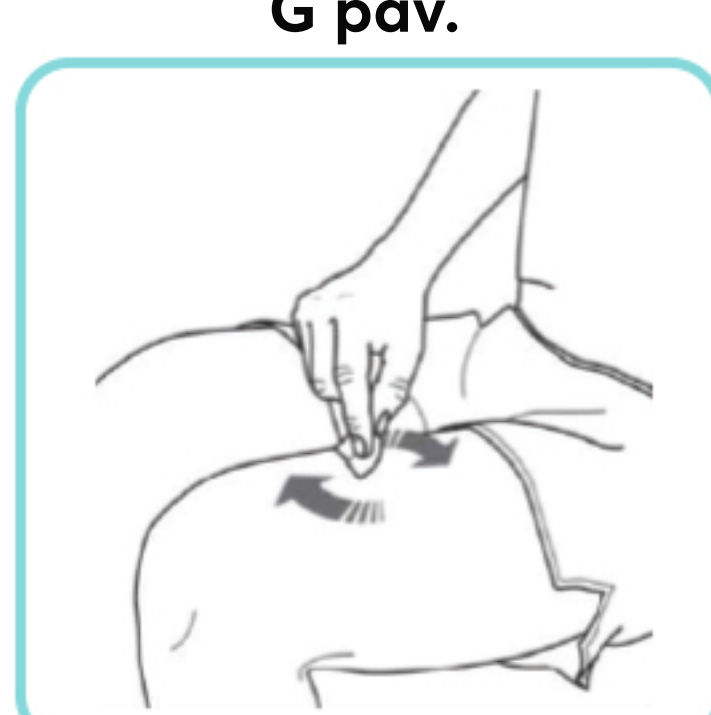

INJEKCIJOS SULEIDIMAS


4 veiksmas. Nuimkite dangtelį:

- Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai būsite pasirengę atlikti injekciją naudodamiesi švirkštinčiu.
- Nusukite dangtelį pavaizduotos rodyklės kryptimi (žr. H pav.).
- Nuimtą dangtelį išmeskite. **Nebandykite vėl pritvirtinti dangtelio atgal.**
- Nuėmus dangtelį švirkštinį reikia vartoti per 5 minutes.


Ant adatos smaigalio galite pastebėti tirpalo lašelių. Tai yra normalu.

5 veiksmas. Laikykite švirkštinį:


- Švirkštinį laikykite 90° kampū ties nuvalyta injekcijos vieta (žr. I pav.).

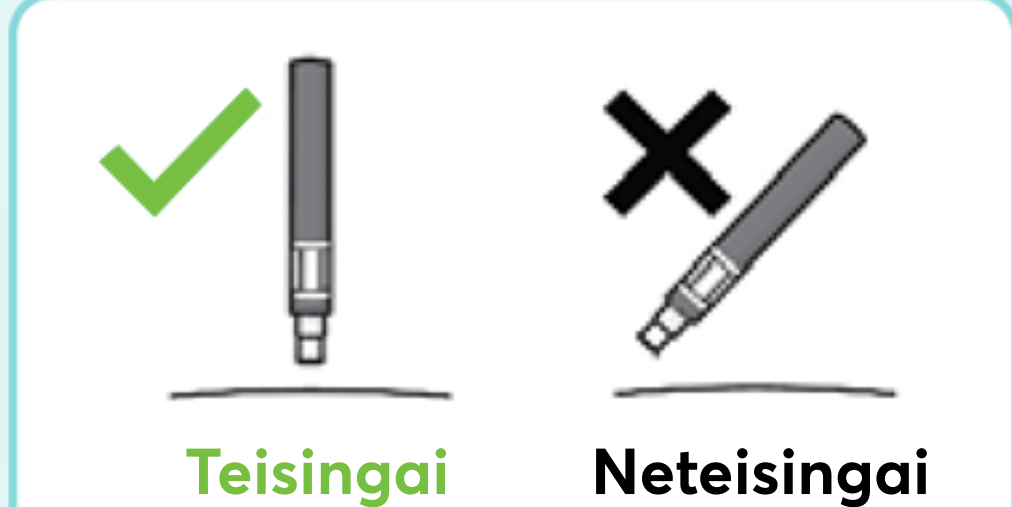

H pav.

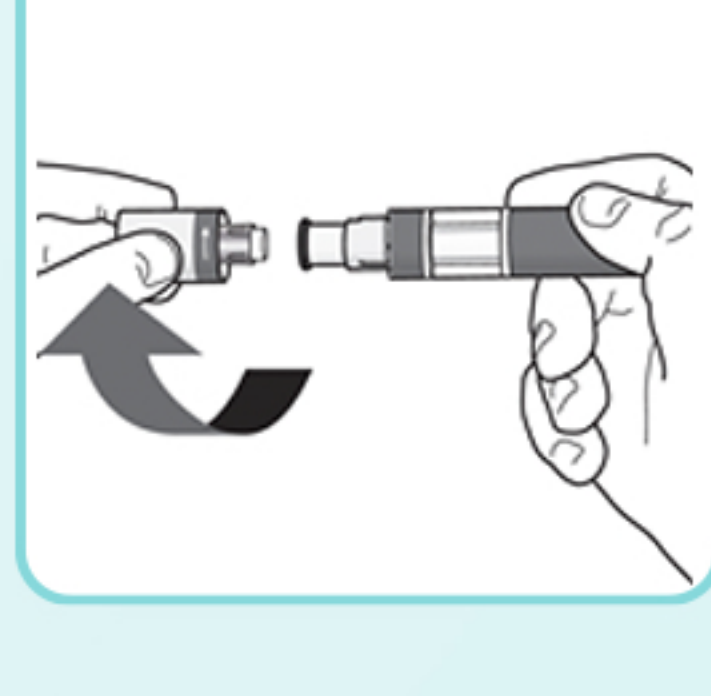

I pav.

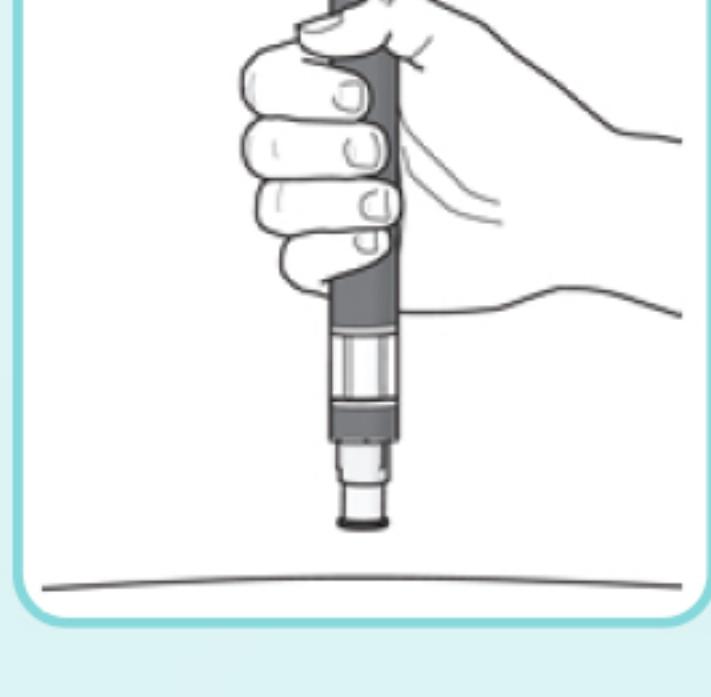

Svarbu: Injekcijos atlikimo metu Jūs išgirsite 2 garsius spragtelėjimus:


- **Pirmasis spragtelėjimas** rodo, kad **injekcija pradėta**.
- **Antrasis spragtelėjimas** rodo, kad **injekcija beveik baigta**.

Būtinai toliau tvirtai spauskite švirkštinį prie odos, kol pamatysite, kad **žalias indikatorius** užpildys apžiūros langelį ir nustos judėjęs.


6 veiksmas. Injekcijos pradžia:

- Tvirtai prispauskite švirkštinį prie odos ir pradėkite injekciją (žr. J pav.).
- **Pirmasis spragtelėjimas** rodo, kad **injekcija pradėta**.
- **Toliau tvirtai spauskite** švirkštinį prie odos.
- **Žalias indikatorius** rodo injekcijos eigą.

J pav.

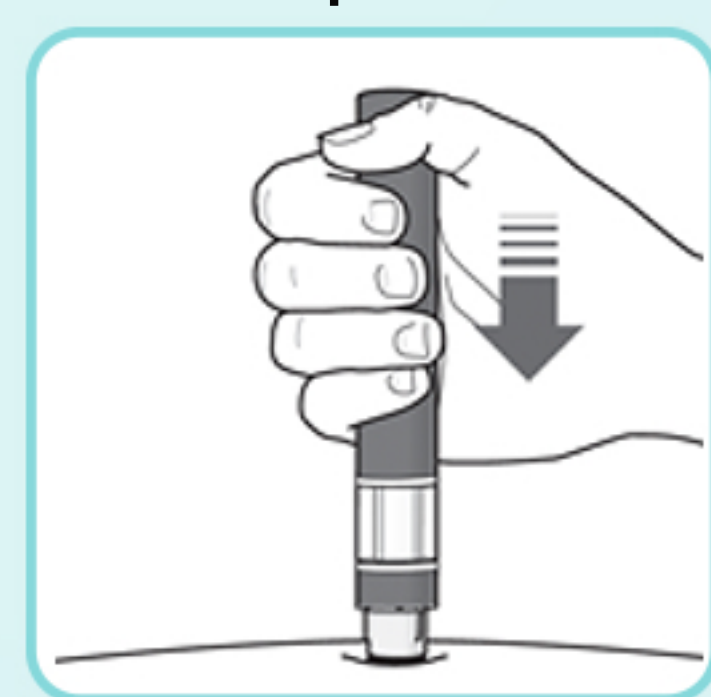

K pav.

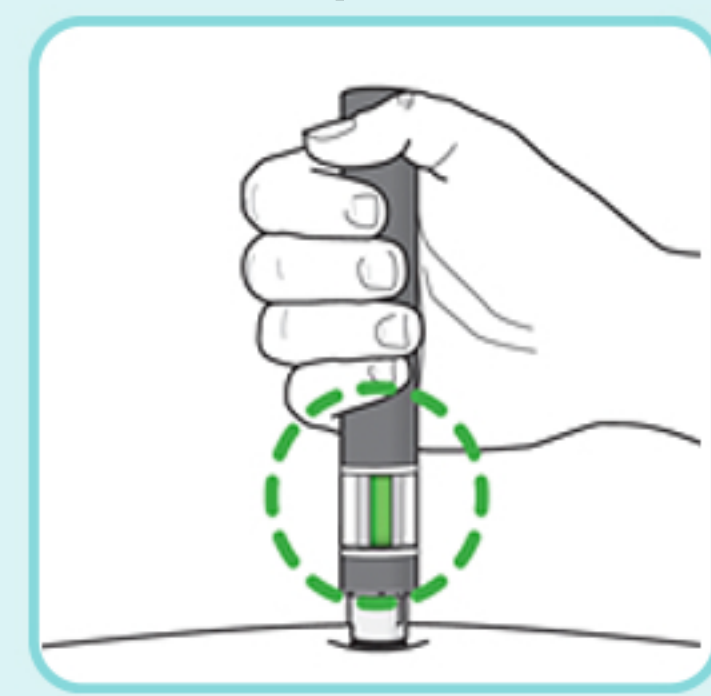

L pav.



PO INJEKCIJOS:

- Jeigu žalias indikatorius neužpildo langelio, tai reiškia, kad Jūs nesusileidote pilnos vaisto dozės. Jeigu nematote žalio indikatoriaus, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Injekcijos vietoje gali likti šiek tiek kraujo. Injekcijos vietą galite prispausti medvilnės ar marlės gniužulėliu ir palaikyti 10 sekundžių. Injekcijos vietos netrinkite. Jei kraujavimas tęsiasi, prireikus injekcijos vietą galite pridengti nedideliu pleistru.

KAIP TURĖTUMĖTE IŠMESTI PANAUDOTĄ KESIMPTA SENSOREADY PEN ŠVIRKŠTINĮ?

8 veiksmas. Išmeskite panaudotą Kesimpta Sensoready Pen švirkštinį:

- Panaudotą švirkštinį išmeskite į aštriems daiktams laikyti skirtą talpyklę (t. y. į uždarą ir nepraduriamą talpyklę ar panašią talpą) (žr. M pav.).
- Niekada nebandykite švirkštinio naudoti pakartotinai.

Aštriems daiktams skirtą talpyklę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

M pav.

