

Instructies voor het gebruik van de Kesimpta® Sensoready®-pen

Het is belangrijk dat u deze gebruiksinstructies begrijpt en volgt voordat u een injectie met Kesimpta toedient. Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Kesimpta voor de eerste keer gaat gebruiken.

BELANGRIJKE INFORMATIE OM TE ONTHOUDEN:


- De pen **niet gebruiken** als de verzegeling van de buitenverpakking of van de pen is verbroken. Bewaar de pen in de verzegelde buitenverpakking tot u klaar bent om de pen te gebruiken.
- De pen **niet schudden**.
- Als u een pen laat vallen, mag u de pen **niet gebruiken** als de pen beschadigd lijkt te zijn. Gebruik een pen ook niet als u de pen zonder dop heeft laten vallen.
- Gooi de gebruikte pen onmiddellijk na gebruik weg. **De Kesimpta Sensoready-pen mag u maar eenmaal gebruiken.** Zie "Instructies voor het weggooien van de gebruikte Kesimpta Sensoready-pen" aan het einde van deze gebruiksinstructies.

HOE BEWAART U KESIMPTA?

- Bewaar de doos met de pen in een koelkast tussen 2 °C en 8 °C.
- Bewaar de pen ter bescherming tegen licht in de oorspronkelijke doos tot u klaar bent om de pen te gebruiken.
- De pen **niet in de vriezer bewaren**.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

ONDERDELEN VAN DE KESIMPTA SENSOREADY-PEN (zie afbeelding A):

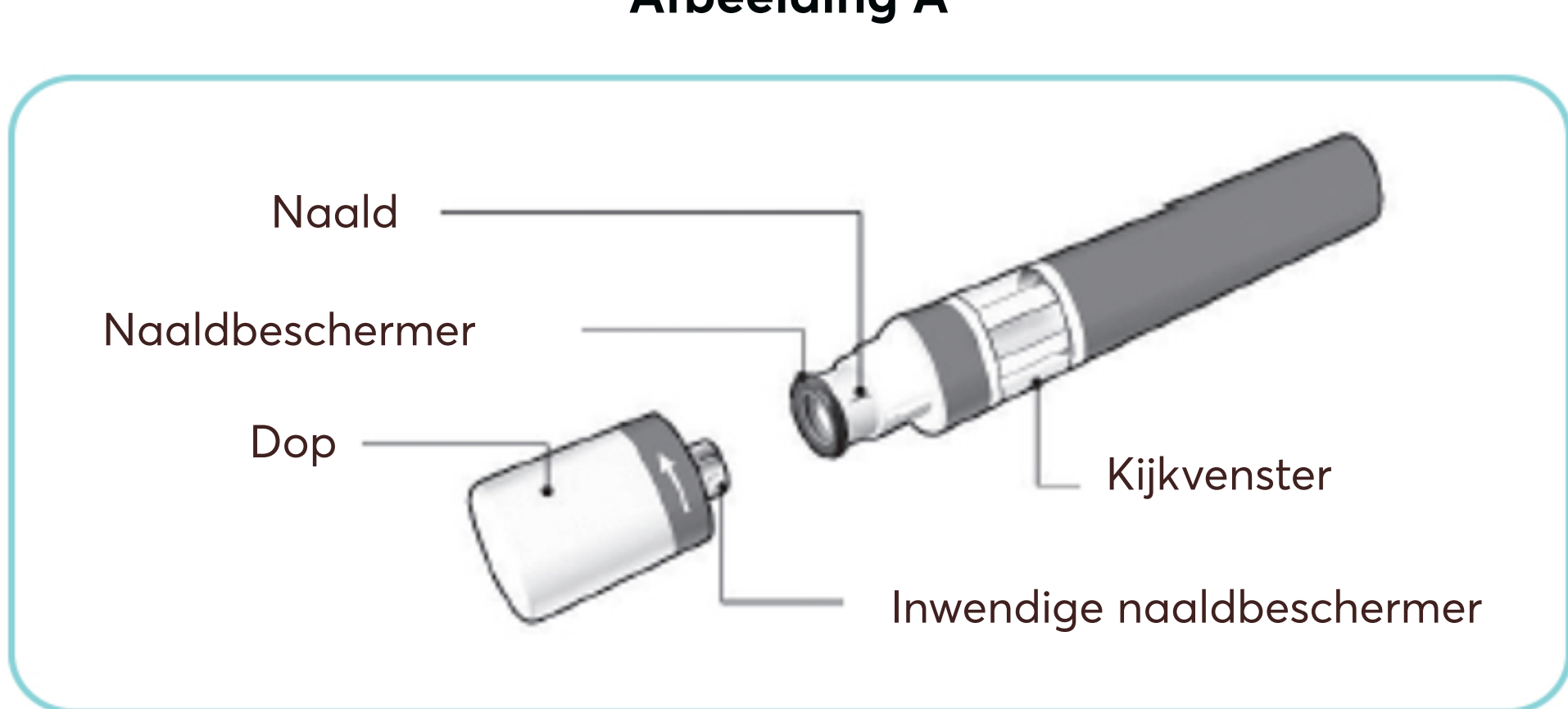


De Kesimpta Sensoready-pen is afgebeeld zonder dop. Verwijder de dop **niet** als u nog niet klaar bent om de injectie toe te dienen.

WAT HEEFT U NODIG VOOR UW INJECTIE?


Inbegrepen in de doos:

- Een nieuwe Kesimpta Sensoready-pen (zie afbeelding B).

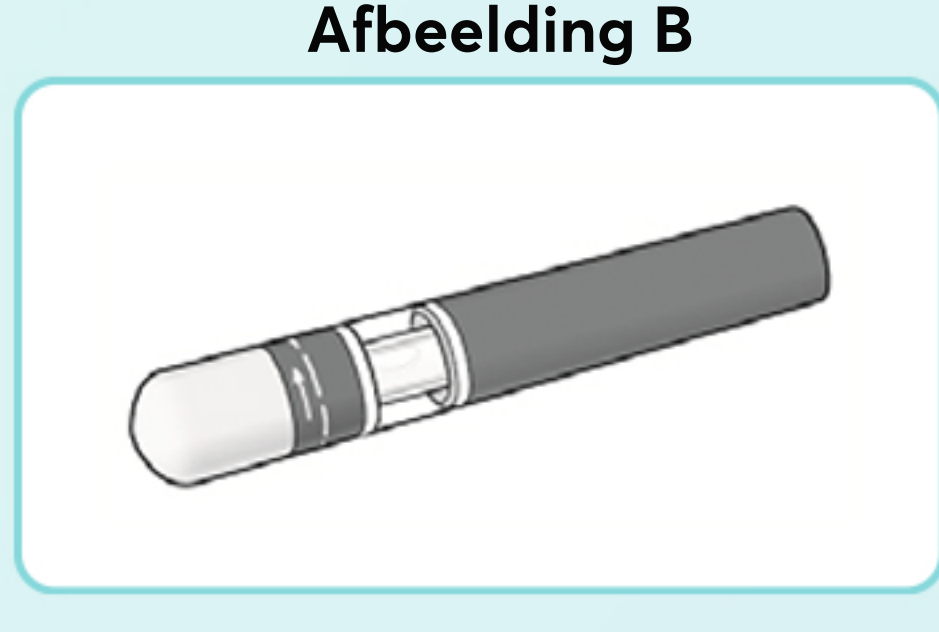

Niet inbegrepen in de doos (zie afbeelding C):

- 1 alcoholdoekje
- 1 wattenbolletje of gaasje
- Naaldencontainer

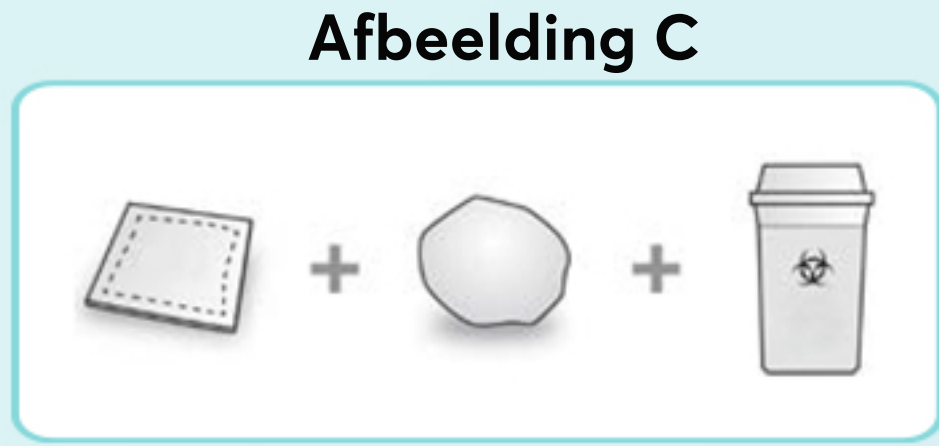

Zie "Instructies voor het weggooien van de gebruikte Kesimpta Sensoready-pen" aan het einde van deze gebruiksinstructies.


VÓÓR UW INJECTIE:

Neem de pen **15 tot 30 minuten** vóór het injecteren uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten komen.

Stap 1. Belangrijke veiligheidscontroles voordat u injecteert (zie afbeelding D):


- Kijk door het kijkvenster. De vloeistof moet helder tot bijna doorschijnend zijn.
Niet gebruiken als de vloeistof zichtbare deeltjes bevat of troebel is.
Mogelijk ziet u een kleine luchtbel; dat is normaal.
- Controleer de **uiterste houdbaarheidsdatum (EXP)** op uw pen. **Gebruik de pen niet meer** na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Neem contact op met uw apotheker of zorgprofessional als een pen niet voldoet aan deze veiligheidscontroles.

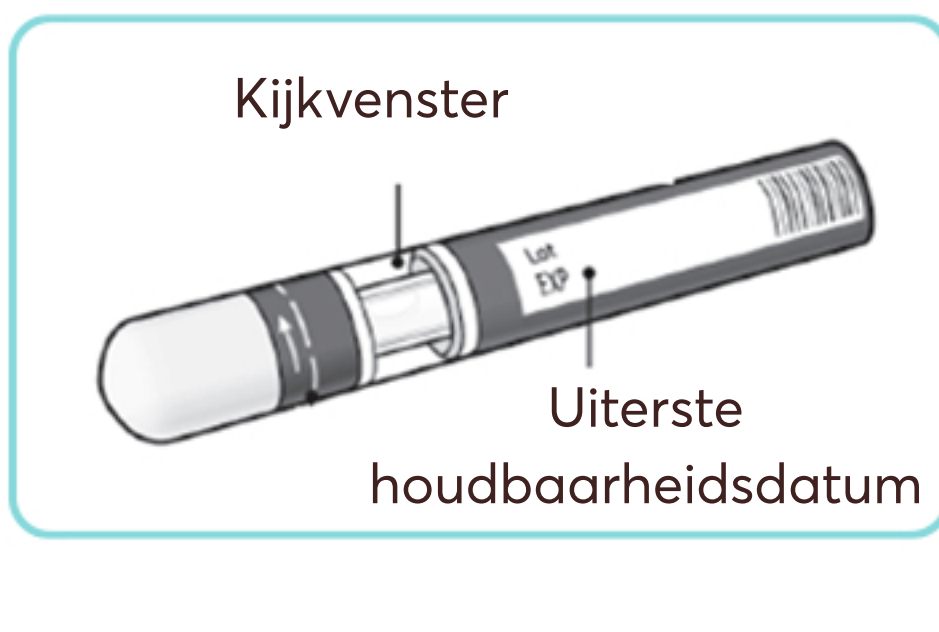


Stap 2. Hoe kiest u de injectieplaats?

- De aanbevolen plaats is de voorzijde van uw bovenbenen. U kunt ook de onderbuik gebruiken, maar **niet** het gebied van 5 cm rond de navel (zie afbeelding E).
- Kies voor elke injectie die u aan uzelf toedient een andere plaats.
- **Injecteer niet** in gebieden waar de huid gevoelig, gekneusd, rood, schilferig of hard is. Vermijd gebieden met littekens of striemen (striae) en ook infectieplaatsen.
- Als een **verzorger** of **zorgprofessional** u uw injectie geeft, kunnen ze deze ook toedienen in de buitenkant van uw bovenarm (zie afbeelding F).

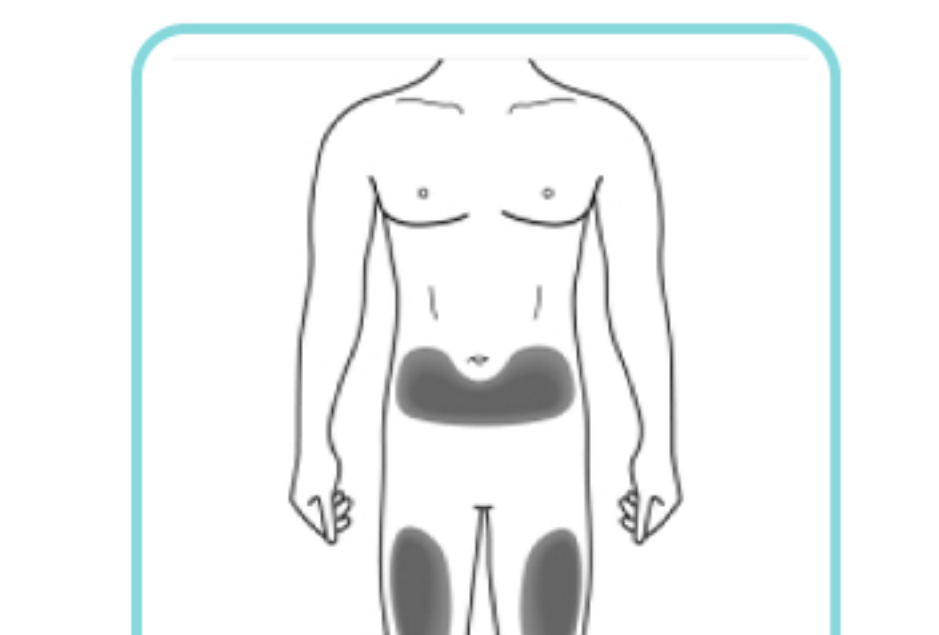

Afbeelding F (alleen verzorger en zorgprofessional)

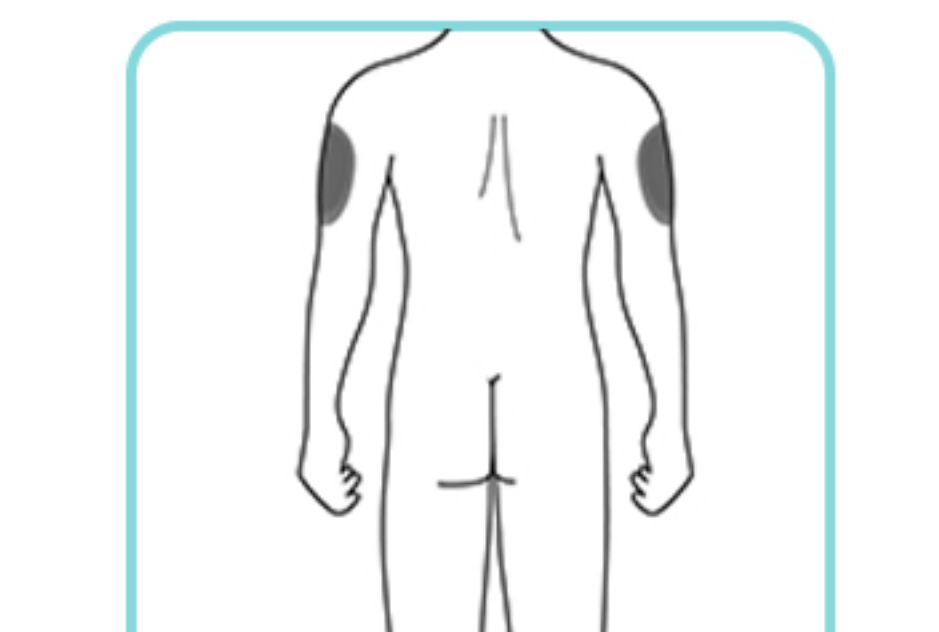

Stap 3. Hoe reinigt u de injectieplaats?

- Was uw handen met water en zeep.
- Reinig met ronddraaiende bewegingen de injectieplaats met het alcoholdoekje. Laat opdrogen voordat de injectie wordt toegediend (zie afbeelding G).
- Raak de gereinigde plaats vóór het injecteren niet meer aan.




UW INJECTIE

Stap 4. Verwijdering van de dop:


- Verwijder de dop pas wanneer u klaar bent om de pen te gebruiken.
- Draai de dop eraf in de richting van het pijltje (zie afbeelding H).
- Gooi de dop weg. **Probeer niet de dop terug te plaatsen.**
- Gebruik de pen binnen 5 minuten nadat de dop is verwijderd.

Misschien ziet u een paar druppels geneesmiddel uit de naald komen. Dat is normaal.

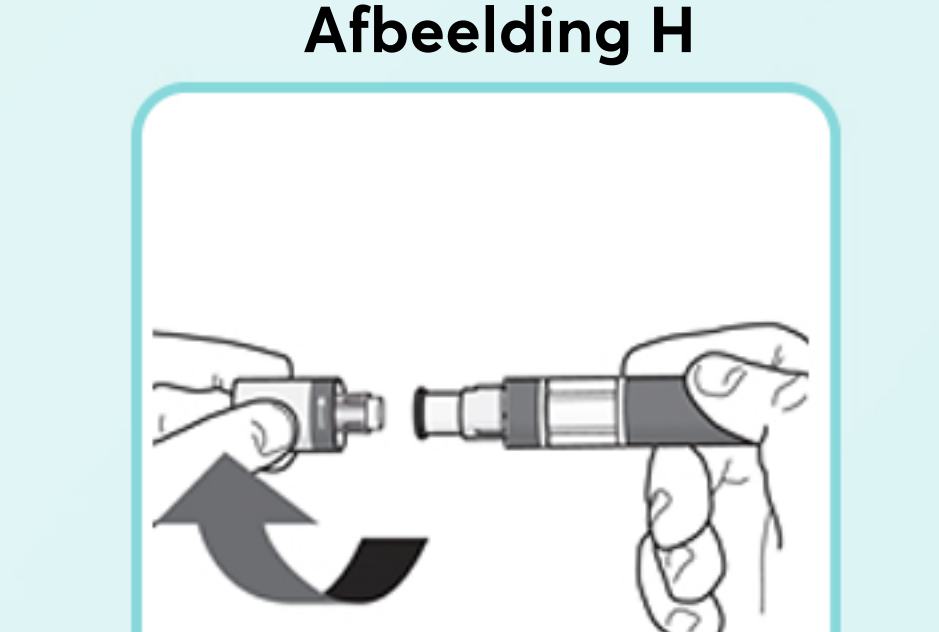

Stap 5. Hoe houdt u uw pen vast?

- Houd de pen loodrecht (in een hoek van 90°) tegen de gereinigde injectieplaats (zie afbeelding I).

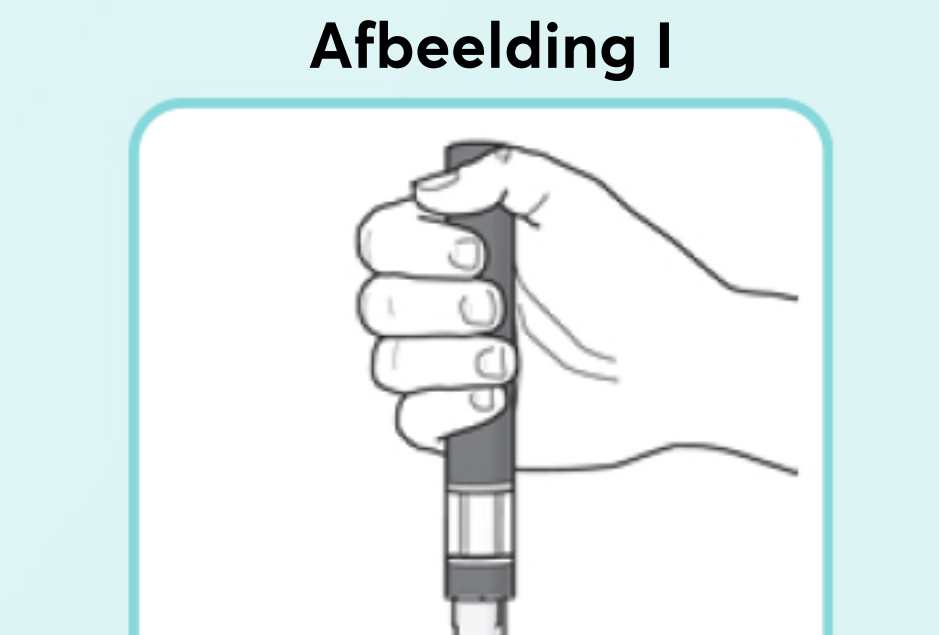


Belangrijk: Tijdens de injectie hoort u 2 luide klikken:

- De **eerste klik** geeft aan dat de **injectie is begonnen**.
- De **tweede klik** geeft aan dat de **injectie bijna is afgerond**.

U moet de pen stevig tegen uw huid gedrukt houden tot de **groene indicator** het venster vult en niet meer beweegt.


Stap 6. Uw injectie starten:

- Duw de pen stevig tegen de huid om de injectie te starten (zie afbeelding J).
- De **eerste klik** geeft aan dat de injectie is begonnen.
- **Blijf** de pen stevig tegen uw huid gedrukt houden.
- De **groene indicator** geeft de voortgang van de injectie aan.

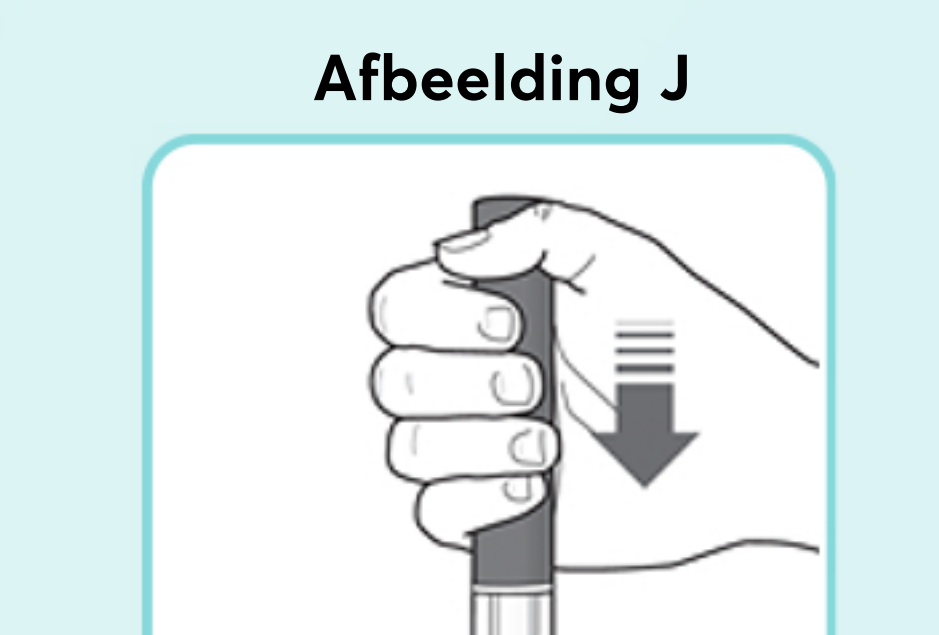

Stap 7. Afronding van uw injectie:

- Luister of u de **tweede klik** hoort. Deze geeft aan dat de injectie **bijna** is voltooid.
- Controleer of de **groene indicator** het venster helemaal opvult en niet meer beweegt (zie afbeelding K).
- U kunt nu de pen verwijderen (zie afbeelding L).

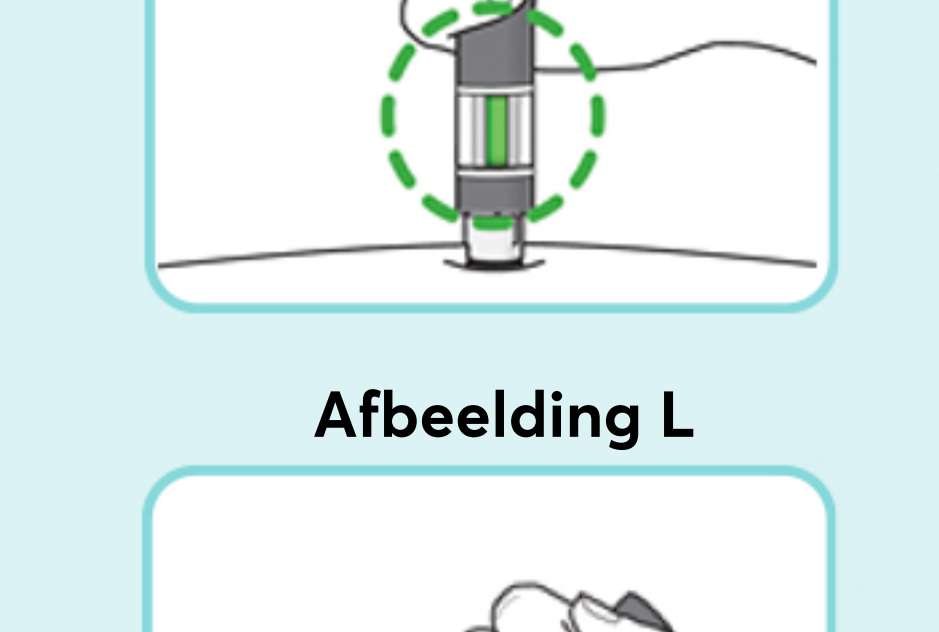

NA UW INJECTIE:

- Als de groene indicator het venster niet opvult, betekent dit dat u geen volledige dosis heeft gehad. Neem contact op met uw arts of apotheker als de groene indicator niet zichtbaar is.
- Op de injectieplaats kan een klein beetje bloed zichtbaar zijn. U kunt gedurende 10 seconden met een wattenbolletje of een gaasje druk uitoefenen op de injectieplaats. Niet over de injectieplaats wrijven. Indien het bloeden aanhoudt, kunt u de injectieplaats afdekken met een kleine pleister.

INSTRUCTIES VOOR HET WEGGOOIEN VAN DE GEBRUIKTE KESIMPTA SENSOREADY-PEN

Stap 8. Uw Kesimpta Sensoready-pen weggooien:

- Gooi de gebruikte pen na gebruik weg in een naaldencontainer (afsluitbare, prikbestendige container of iets vergelijkbaars) (zie afbeelding M).
- Probeer nooit uw pen nogmaals te gebruiken.

Houd de naaldencontainer buiten het bereik van kinderen.

