

Norādījumi Kesimpta® Sensoready® pildspalvveida pilnšļircē lietošanai

Pirms Kesimpta ievadīšanas ir svarīgi saprast un ievērot šos lietošanas norādījumus. Ja Jums ir kādi jautājumi, pirms Kesimpta pirmās lietošanas reizes konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

ATCERIETIES:

- **Nelietojiet** Kesimpta pildspalvveida pilnšļirci, ja ārējās kastes zīmogs vai pildspalvas zīmogs ir bojāts. Glabājiet pildspalvu noslēgtā ārējā iepakojumā, līdz esat gatavs to lietot.
- **Nekratiet** pildspalvu.
- Ja pildspalva nokrīt, **nelietojiet** to, ja tā izskatās bojāta vai ja tā krita ar noņemtu vāciņu.


- Izmetiet izlietoto pildspalvu tūlīt pēc lietošanas. **Neizmantojiet pildspalvveida pilnšļirci atkārtoti.** Skatīt "Kā izmest izlietoto Kesimpta Sensoready pildspalvveida pilnšļirci?" lietošanas instrukcijas beigās.

KĀ UZGLABĀT KESIMPTA?

- Uzglabājiet kasti ar pildspalvveida pilnšļirci ledusskapī temperatūrā no 2°C līdz 8°C.
- Uzglabājiet pildspalvu oriģinālā kastē līdz lietošanas brīdim, lai pasargātu no gaismas.
- **Nesasaldējiet** pildspalvveida pilnšļirci.

Uzglabājiet Kesimpta bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

KESIMPTA SENSOREADY PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES DAĻAS (skatīt A attēlu):

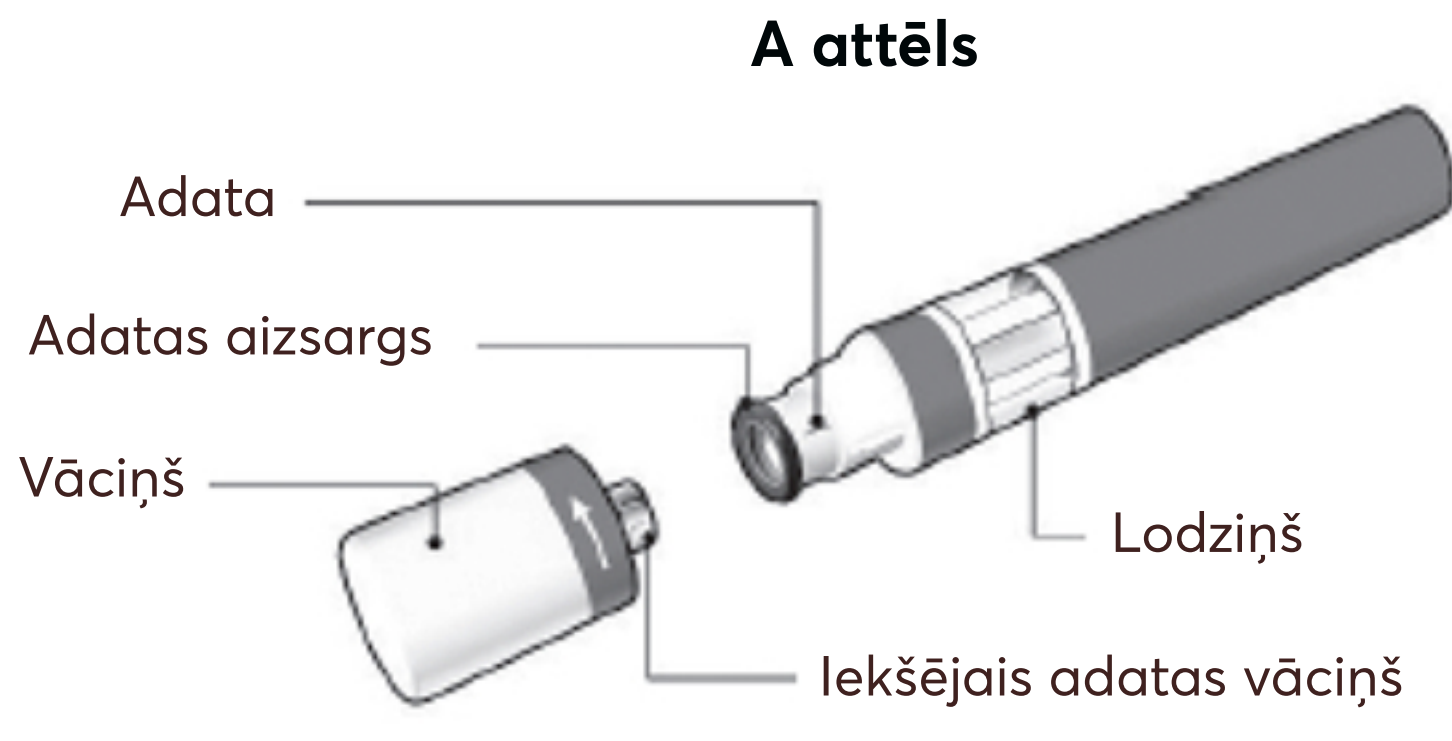


Kesimpta Sensoready pildspalvveida pilnšļircē ir parādīta bez vāciņa. **Noņemiet vāciņu tikai tieši pirms injekcijas veikšanas.**

KAS JUMS NEPIECIEŠAMS INJEKCIJAS VEIKŠANAI:

Iekļauts kastītē:

- Jauna Sensoready Kesimpta pildspalvveida pilnšļircē (**skatīt B attēlu**)

B attēls

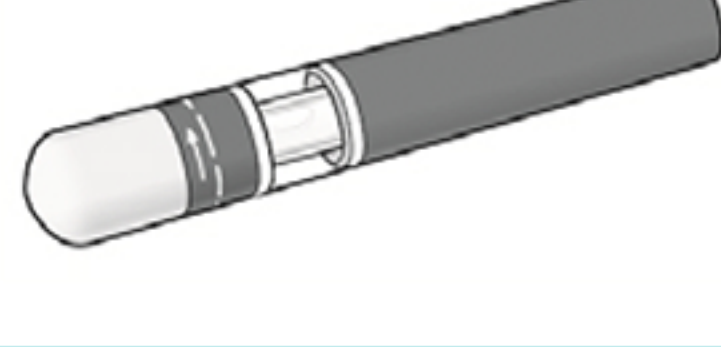

Nav iekļauts kastītē (**skatīt C attēlu**):

- 1 spirta salvete
- 1 vates tampons vai marle
- Konteiners asiem priekšmetiem

C attēls



Skatīt "Kā izmest izlietoto Kesimpta Sensoready pildspalvveida pilnšļirci?" lietošanas instrukcijas beigās.

PIRMS INJEKCIJAS VEIKŠANAS:


Izņemiet pildspalvveida pilnšļirci no ledusskapja **15-30 minūtes pirms injekcijas**, lai tā sasniegtu istabas temperatūru.

1. solis. Svarīgas drošības pārbaudes pirms injekcijas (skatīt D attēlu):

- Apskatiet šķīdumu caur lodziņu. Šķīdumam jābūt dzidram vai viegli opalescējošam. **Nelietojiet** pildspalvu, ja šķīdums satur redzamas daļiņas vai ir duļķains. Šķīdumā var būt neliels gaisa burbulis. Tas ir normāli.
- Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļircē **derīguma termiņu (EXP)**. **Nelietojiet** pildspalvveida pilnšļirci, ja derīguma termiņš ir beidzies.

Sazinieties ar farmaceitu vai veselības aprūpes speciālistu, ja pildspalvveida pilnšļircē neatbilst kādai no uzskaitītajām prasībām.


D attēls

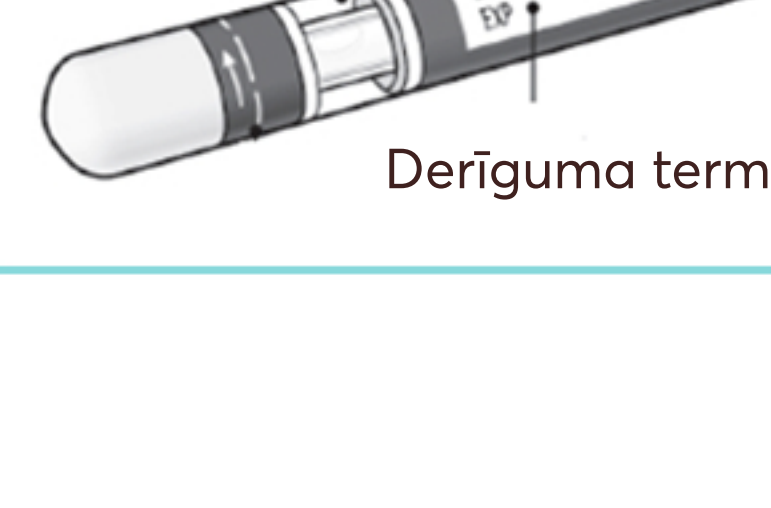

2. solis. Izvēlieties injekcijas vietu:


- Ieteicamā vieta ir augšstilbu priekšējā daļa. Jūs varat izmantot arī vēdera lejasdaļu, bet **ne** 5 cm rajonā ap nabu (**skatīt E attēlu**).
- Katru reizi, kad injicējat Kesimpta, izvēlieties citu vietu.
- **Neievadiet zāles** vietās, kur āda ir maiga, sasista, sarkana, zvīņaina vai cieta. Izvairieties no vietām, kur ir rētas, strijas vai infekcija.

E attēls

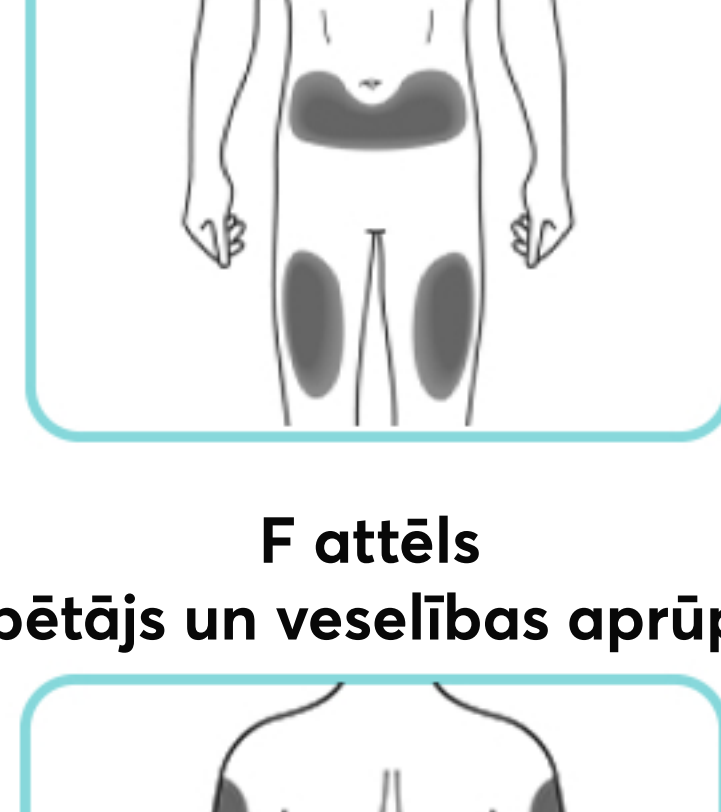

- Ja injekciju veic **aprūpētājs** vai **veselības aprūpes speciālists**, injekcijai var izmantot arī augšdelma ārējo daļu (**skatīt F attēlu**).


F attēls

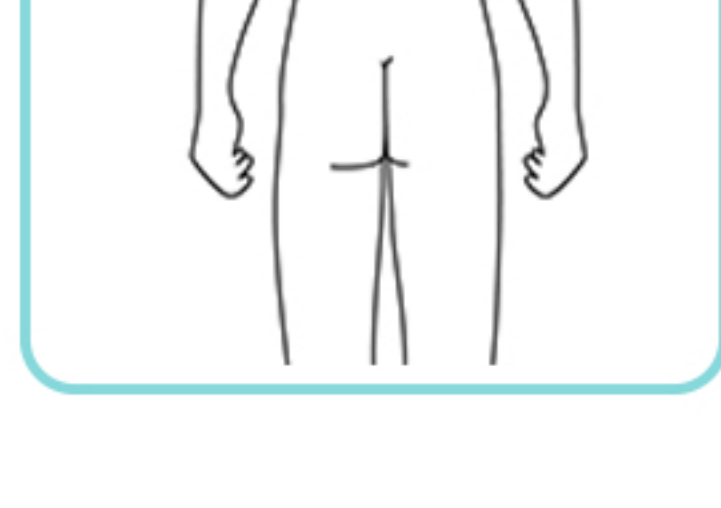

3. solis. Notīriet injekcijas vietu:

- Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
- Ar aplveida kustībām notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Pirms injekcijas ļaujiet tai nožūt (**skatīt G attēlu**).
- Vairs nepieskarieties notīrītajai vietai pirms injekcijas veikšanas.

G attēls

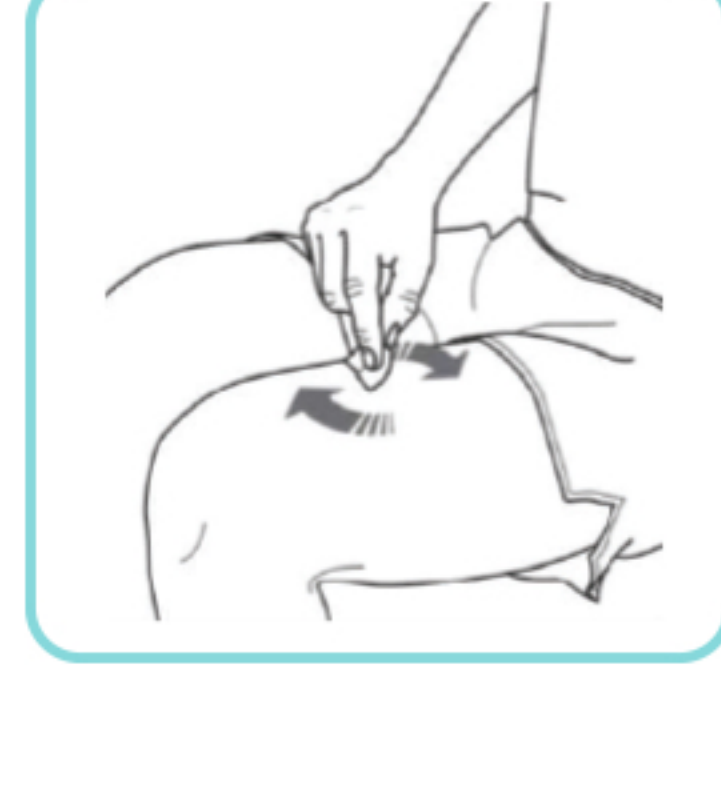


INJEKCIJAS VEIKŠANA

4. solis. Noņemiet vāciņu:

- Noņemiet vāciņu tikai tad, kad esat gatavs veikt injekciju.
- Pagrieziet vāciņu bultas virzienā (**skatīt H attēlu**).
- Izmetiet vāciņu. **Nemēģiniet uzlikt vāciņu atpakaļ.**
- Izmantojiet pildspalvveida pilnšļirci 5 minūšu laikā pēc vāciņa noņemšanas.


Adatas galā var būt daži šķīduma pilieni. Tas ir normāli.

H attēls

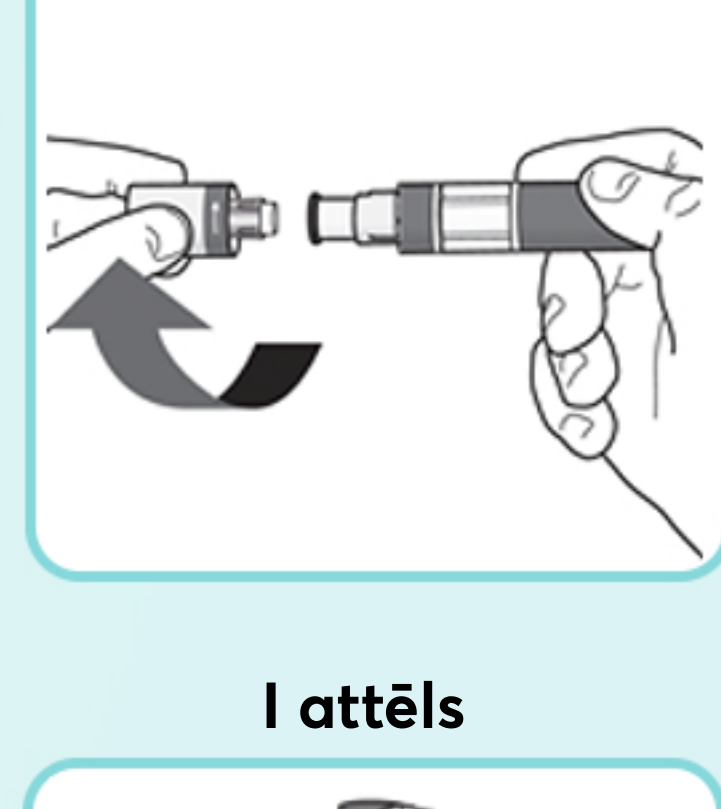


5. solis. Paņemiet pildspalvveida pilnšļirci:

- Turiet pildspalvveida pilnšļirci 90 grādu leņķī pret notīrīto injekcijas vietu (**skatīt I attēlu**).

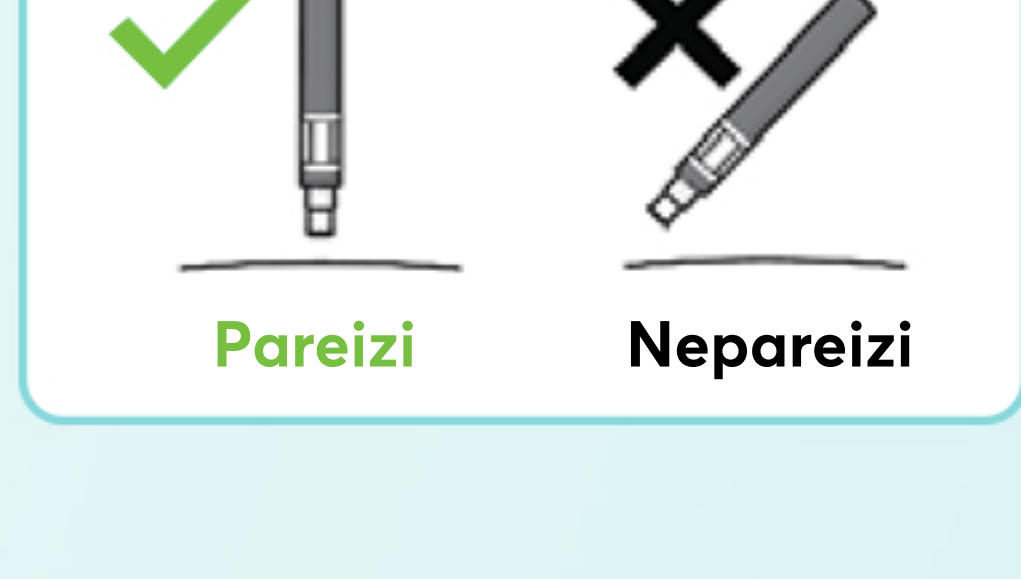

I attēls

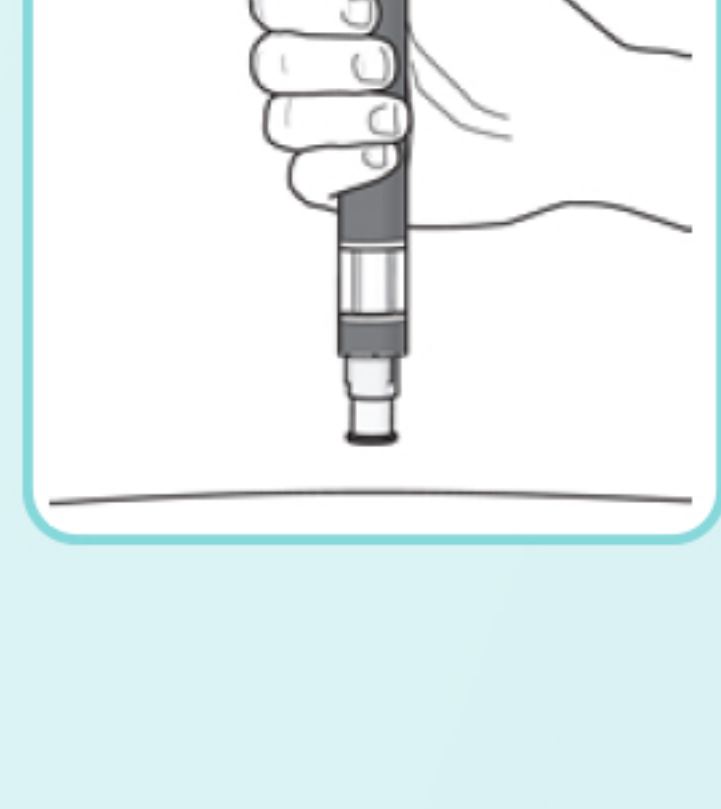

Svarīgi: Injekcijas laikā Jūs dzirdēsiet **2 skaļus klikšķus**:

- **Pirmais klikšķis** norāda, ka **injekcija ir sākusies**.
- **Otrais klikšķis** norāda, ka **injekcija ir gandrīz pabeigta**.

Jums jātur pildspalvveida pilnšļircē cieši pie ādas, līdz **zaļais indikators** piepilda visu lodziņu un pārstāj kustēties.


6. solis. Sāciet injekciju:

- Piespiediet pildspalvveida pilnšļirci cieši pie ādas, lai uzsāktu injekciju (**skatīt J attēlu**).
- **Pirmais klikšķis** norāda, ka injekcija ir sākusies.
- **Turpiniet turēt** pildspalvveida pilnšļirci cieši piespiestu pie ādas.
- **Zaļais indikators** parāda injekcijas gaitu.

J attēls



K attēls

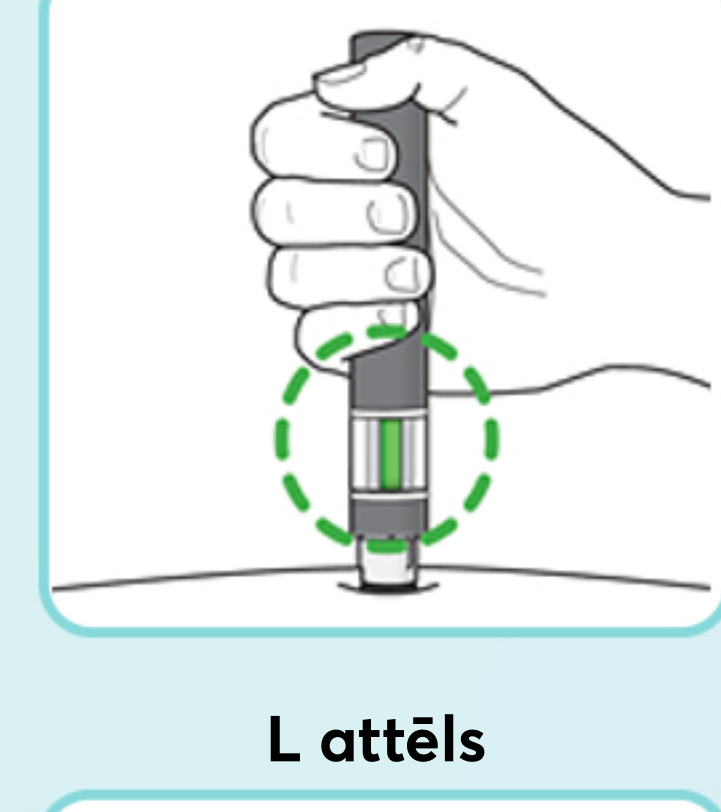

L attēls



7. solis. Pabeidziet injekciju:

- Sagaidiet, kad dzirdēsiet **otro klikšķi**. Tas norāda, ka injekcija ir **gandrīz pabeigta**.
- Pārbaudiet, vai **zaļais indikators** ir aizpildījis lodziņu un vairs nekustas (**skatīt K attēlu**).
- Tagad varat izņemt pildspalvu (**skatīt L attēlu**).

PĒC INJEKCIJAS:

- Ja zaļais indikators neaizpilda lodziņu, tas nozīmē, ka neesat saņēmis pilnu devu. Sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu, ja zaļais indikators nav redzams.

- Injekcijas vietā var būt neliels asiņš. Jūs varat piespiest injekcijas vietu kokvilnas tamponu vai marli un paturēt 10 sekundes. Neberzējiet injekcijas vietu. Ja asiņošana turpinās, injekcijas vietai varat uzlikt plāksteri.

KĀ IZMEST IZMANTOTO KESIMPTA SENSOREADY PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĪ?

8. solis. Izmetiet Kesimpta Sensoready pildspalvveida pilnšļirci:

- Izlietoto pildspalvveida pilnšļirci izmetiet asiem priekšmetiem paredzētajā konteinerā (pret caurduršanu izturīgā aizveramā konteinerā) (**skatīt M attēlu**).

- Nekad nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci atkārtoti.

Glabājiet asu priekšmetu konteineru bērniem nepieejamā vietā.

M attēls



Download PDF

Lietošanas noteikumi

Šikdatņu politika

Šikdatņu iestatījumi

© 2022 Novartis BS2207289340 2022. gada jūlijs

▼ Šim zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tas ļaus ātri identificēt jaunu drošuma informāciju. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par visām blakusparādībām, kas Jums varētu parādīties. Detalizētu informāciju lūdz skatīt iesaiņojuma informācijas lapā.