

Instrucțiuni de utilizare a stiloului Kesimpta® Sensoready®

Este important să înțelegeți și să respectați aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a administra Kesimpta. Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală dacă aveți orice întrebări înainte de prima utilizare a Kesimpta.

REȚINEȚI:


- **Nu utilizați** stiloul dacă sigiliul cutiei exterioare sau sigiliul stiloului este rupt. Păstrați stiloul în cutia exterioară sigilată până când sunteți gata să îl utilizați.
- **Nu agitați** stiloul.
- Dacă scăpați stiloul pe jos, **nu îl utilizați** dacă stiloul pare deteriorat sau dacă l ați scăpat cu capacul scos.
- Aruncați stiloul folosit imediat după utilizare. **Nu reutilizați stiloul.** Vezi „Cum să arunc stiloul Kesimpta Sensoready folosit?” de la sfârșitul acestor Instrucțiuni de utilizare.

CUM TREBUIE SĂ PĂSTREZ KESIMPTA?

- Păstrați stiloul la frigider, la temperaturi cuprinse între 2°C și 8°C.
- Păstrați stiloul în cutia exterioară până când sunteți gata de utilizare pentru a fi protejat de lumină.
- **Nu congelați** stiloul.

Nu lăsați Kesimpta la vederea și îndemâna copiilor.

COMPONENTELE STILOULUI SENSOREADY KESIMPTA (vezi Imaginea A):

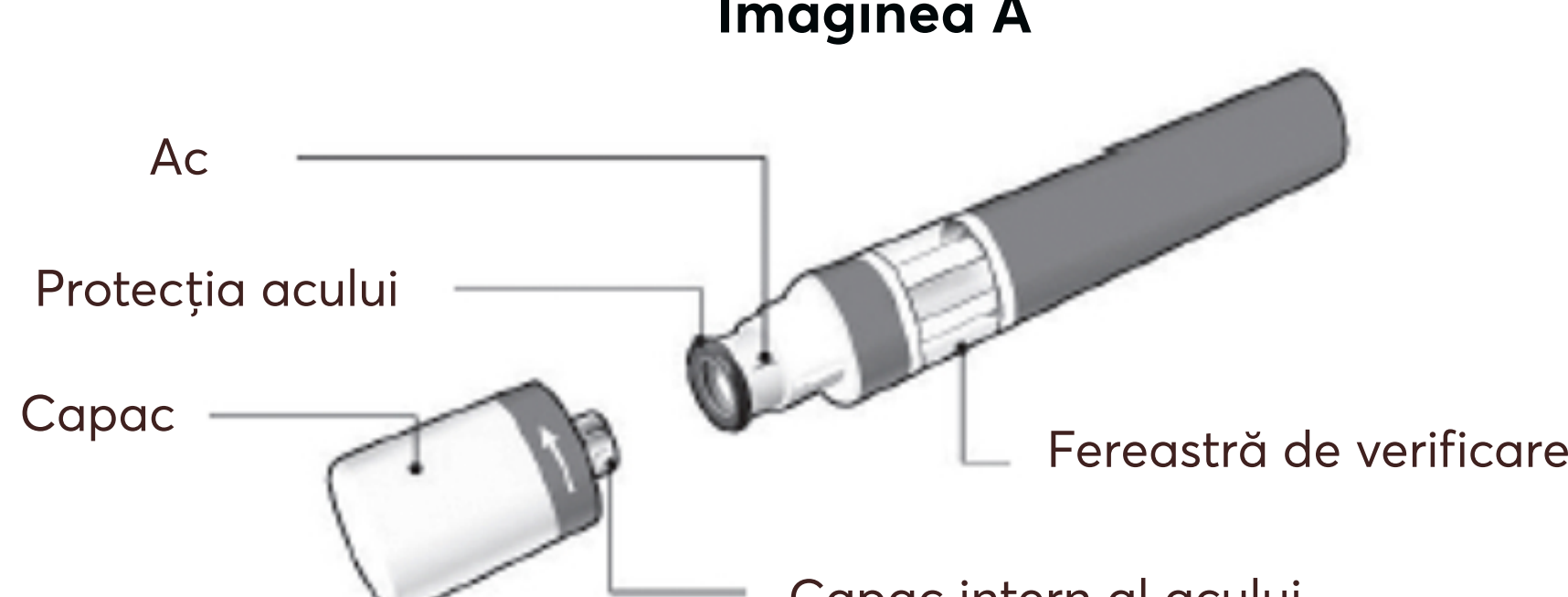


Stiloul Sensoready Kesimpta este arătat cu capacul scos. **Nu** scoateți capacul până când nu sunteți gata să administrați injecția.

DE CE AVEȚI NEVOIE PENTRU INJECTARE:

Incluse în cutie:

- Un stilou Sensoready Kesimpta (**vezi Imaginea B**)


Imaginea B

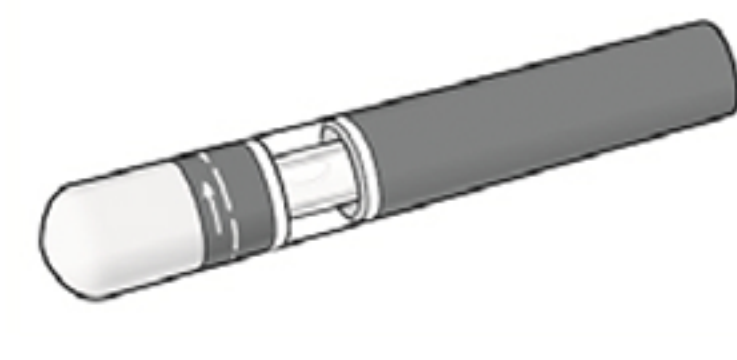

Neincluse în cutie (**vezi Imaginea C**):

- 1 tampon de alcool medicinal
- 1 tampon de vată sau pansament
- Recipient de eliminare a deșeurilor medicale

Imaginea C

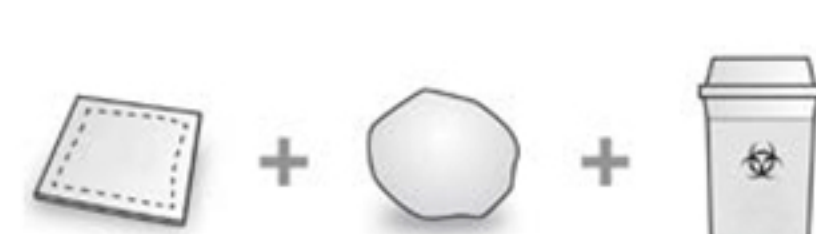

Vezi „Cum să arunc stiloul Sensoready Kesimpta folosit?” de la sfârșitul acestor Instrucțiuni de utilizare.

ÎNAINTE DE INJECTARE:


Scoateți stiloul din frigider cu **15-30 minute înainte de injectare** pentru a ajunge la temperatura camerei.

Pasul 1. Verificări importante de siguranță înainte de injectare (vezi Imaginea D):

- Priviți prin fereastra de verificare. Lichidul din interior trebuie să fie limpede până la ușor opalescent. **Nu utilizați** dacă lichidul conține particule sau este tulbure. Este posibil să fie vizibilă o mică bulă de aer, ceea ce este normal.
- Verificați **data de expirare (EXP)** de pe stilou. **Nu utilizați** stiloul dacă data de expirare a fost depășită.

Adresați-vă farmacistului sau unui profesionist din domeniul sănătății dacă stiloul dumneavoastră nu trece oricare dintre aceste verificări.


Imaginea D

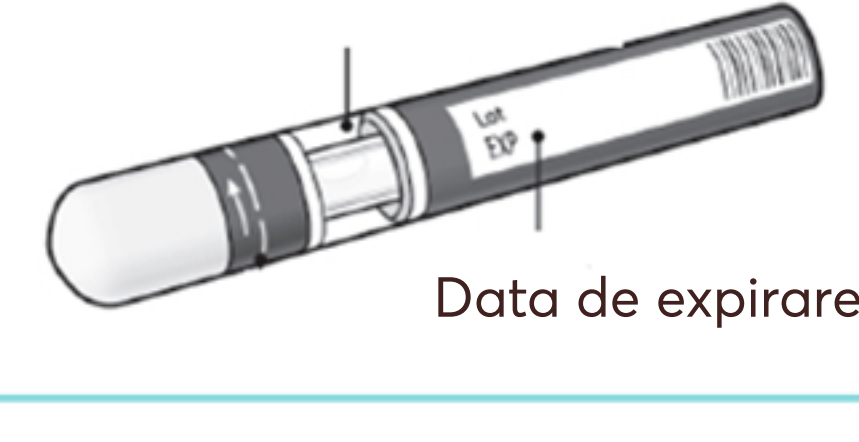


Pasul 2. Alegeți locul de administrare a injecției:

- Locul recomandat este partea din față a coapselor. Puteți utiliza și partea inferioară a stomacului (abdomen), dar **nu** în zona de 5 centimetri din jurul ombilicului (buricului) (**vezi Imaginea E**).
- De fiecare dată alegeți un alt loc pentru administrarea Kesimpta.
- **Nu injectați** în zonele unde pielea este sensibilă, învinețită, înroșită, descumată sau dură. Evitați zonele cu cicatrici sau vergeturi sau infecții.
 - Dacă un **apartinător** sau un **cadru medical** vă administrează injecția, pot utiliza și partea superioară, exterioară, a brațului (**vezi Imaginea F**).

Imaginea E

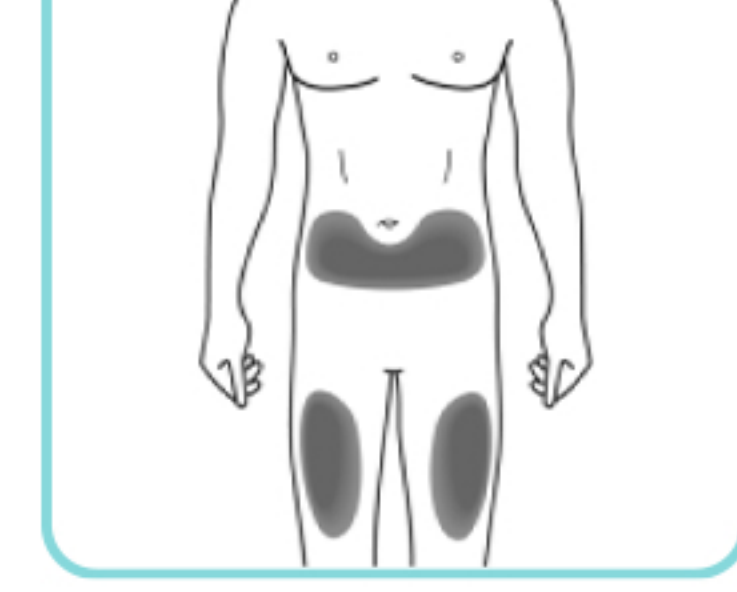


Imaginea F (numai un apartinător sau un cadru medical)

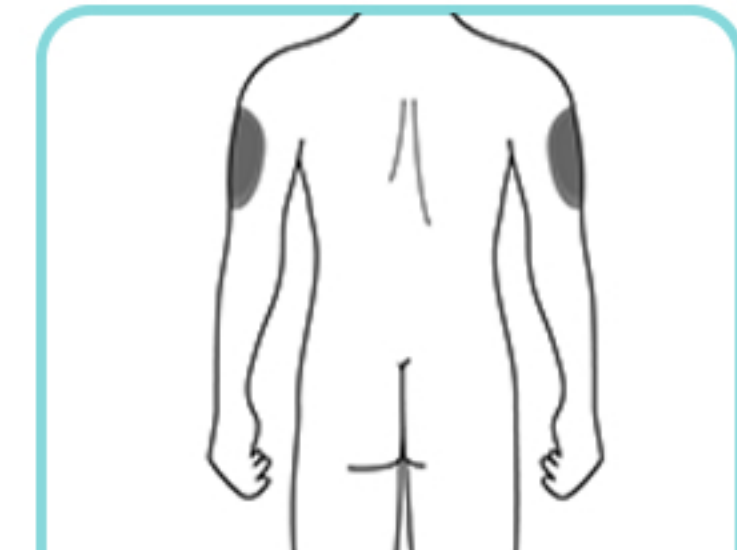

Pasul 3. Dezinfecțați locul de administrare a injecției:

- Spălați-vă mâinile cu apă și săpun.
- Cu o mișcare circulară, dezinfecțați cu un tampon cu alcool locul de administrare a injecției. Lăsați-l să se usuce înainte de administrare (**vezi Imaginea G**).
- Nu atingeți zona dezinfectată înainte de administrare.

Imaginea G

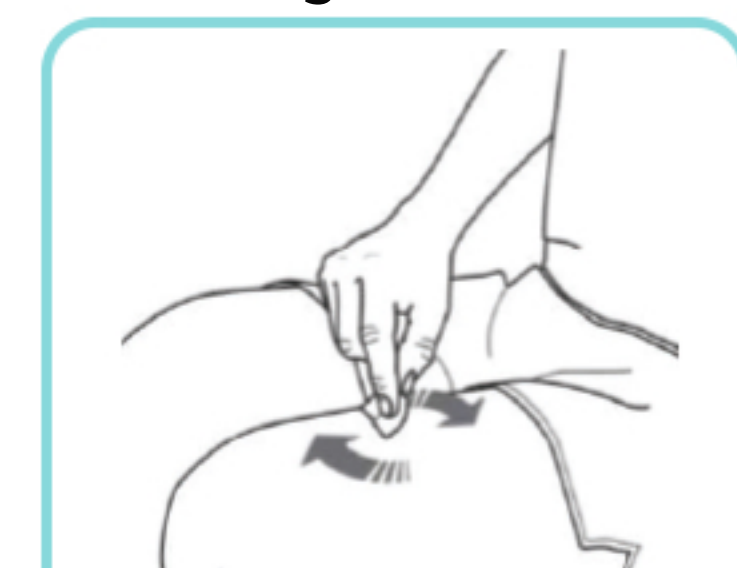


CUM SĂ ADMINISTRAȚI INECȚIA

Pasul 4. Scoateți capacul:

- Scoateți capacul numai când sunteți gata să utilizați stiloul.
- Trageți capacul în sensul indicat de săgeată (**vezi Imaginea H**).
- Aruncați capacul. **Nu îl puneți la loc.**
- Utilizați stiloul în interval de 5 minute de la scoaterea capacului.


Este posibil să vedeți câteva picături de medicament care ies din ac. Acest lucru este normal.

Imaginea H

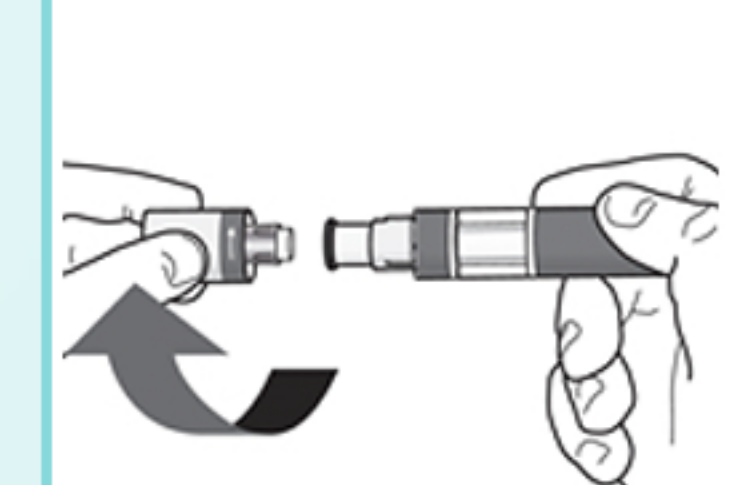

Pasul 5. Ținerea stiloului:

- Țineți stiloul la 90 de grade față de locul de administrare dezinfectat (**vezi Imaginea I**).

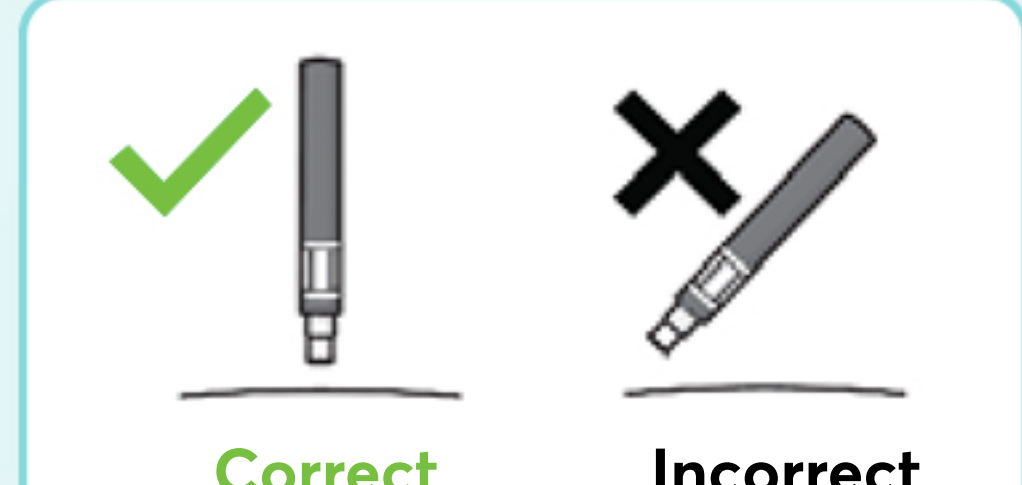

Imaginea I



Important: În timpul administrării injecției, veți auzi 2 clicuri sonore:


- **Primul clic** indică faptul că **injectarea a început**.
- **Al doilea clic** va indica faptul că **injectarea este aproape finalizată**.

Trebuie să țineți stiloul ferm apăsat pe piele până când vedeți **indicatorul verde** că a umplut fereastra și s-a oprit.

Pasul 6. Începerea administrării:

- Apăsăți ferm stiloul pe piele pentru a începe injectarea (**vezi Imaginea J**).
- **Primul clic** indică faptul că **injectarea a început**.
- Continuați să țineți **stiloul ferm apăsat pe piele**.
- **Indicatorul verde** arată stadiul administrării injecției.

Imaginea J

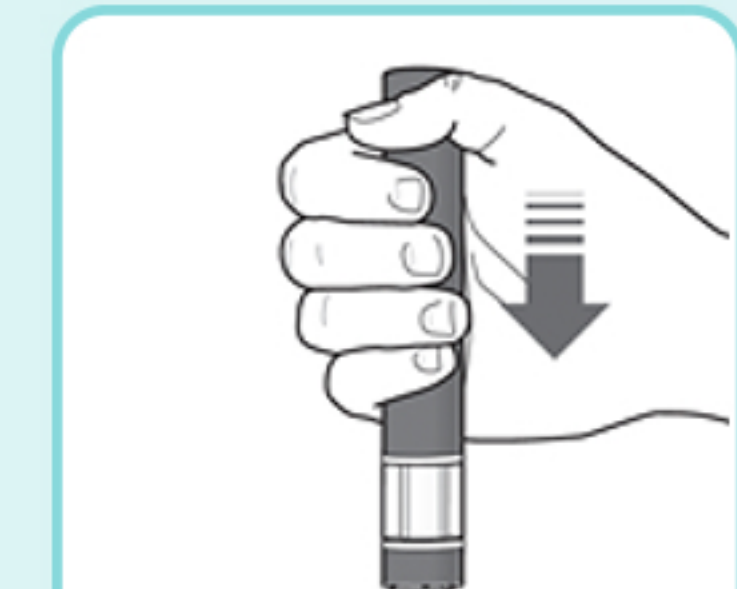

Pasul 7. Finalizarea injecției:

- Așteptați **cel de al doilea clic**. Acesta indică faptul că injectarea este **aproape** finalizată.
- Verificați că **indicatorul verde** a umplut fereastra și s-a oprit (**vezi Imaginea K**).
- Puteți acum să îndepărtați stiloul (**vezi Imaginea L**).

Imaginea K



Imaginea L



DUPĂ INJECTARE:

- Dacă indicatorul verde nu umple fereastra, aceasta înseamnă că nu ați administrat doza completă. Contactați-l pe medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă indicatorul verde nu este vizibil.
- Este posibil să apară o cantitate mică de sânge la locul de administrare. Puteți apăsa cu un tampon de vată sau pansament pe locul de administrare timp de 10 secunde. Nu frecați locul de administrare. Puteți acoperi locul de administrare cu un mic bandaj adeziv, dacă sângerarea continuă.

CUM SĂ ARUNC STILOUL SENSOREADY KESIMPTA FOLOSIT?

Pasul 8. Aruncați stiloul Sensoready Kesimpta:

- Aruncați stiloul folosit în recipient pentru deșeuri medicale (de exemplu, recipient sigilabil, rezistent la perforare sau un recipient similar) (**vezi Imaginea M**).
- Nu reutilizați stiloul.

Nu lăsați recipientul pentru deșeuri medicale la îndemâna copiilor.

Imaginea M

