

Bruksanvisning till Kesimpta® Sensoready®-penna

Det är viktigt att du förstår och följer denna bruksanvisning innan du injicerar Kesimpta. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har frågor, innan du använder Kesimpta för första gången.

KOM IHÅG:


- **Använd inte** injektionspennan om förseglingen på antingen ytterkartongen eller injektionspennan har brutits. Låt injektionspennan ligga kvar i den förseglade ytterkartongen tills du är redo att använda den.
- **Skaka inte** injektionspennan.
- Om du tappar injektionspennan, **använd den inte** om den ser skadad ut eller om den har tappats med skyddshatten avtagen.
- Kassera den använda injektionspennan omedelbart efter användning. **Injektionspennan får inte återanvändas.** Se "Hur ska jag kassera en använd Kesimpta Sensoready-penna?" i slutet av denna bruksanvisning.

HUR SKA JAG FÖRVARA KESIMPTA?

- Förvara kartongen med injektionspennan i kylskåp vid mellan 2 °C och 8 °C.
- Låt injektionspennan ligga kvar i originalkartongen skyddad från ljus tills du är redo att använda den.
- Injektionspennan **får inte frysas**.

Förvara Kesimpta utom syn-och räckhåll för barn.

DELAR I EN KESIMPTA SENSOREADY-PENNA (se Bild A):

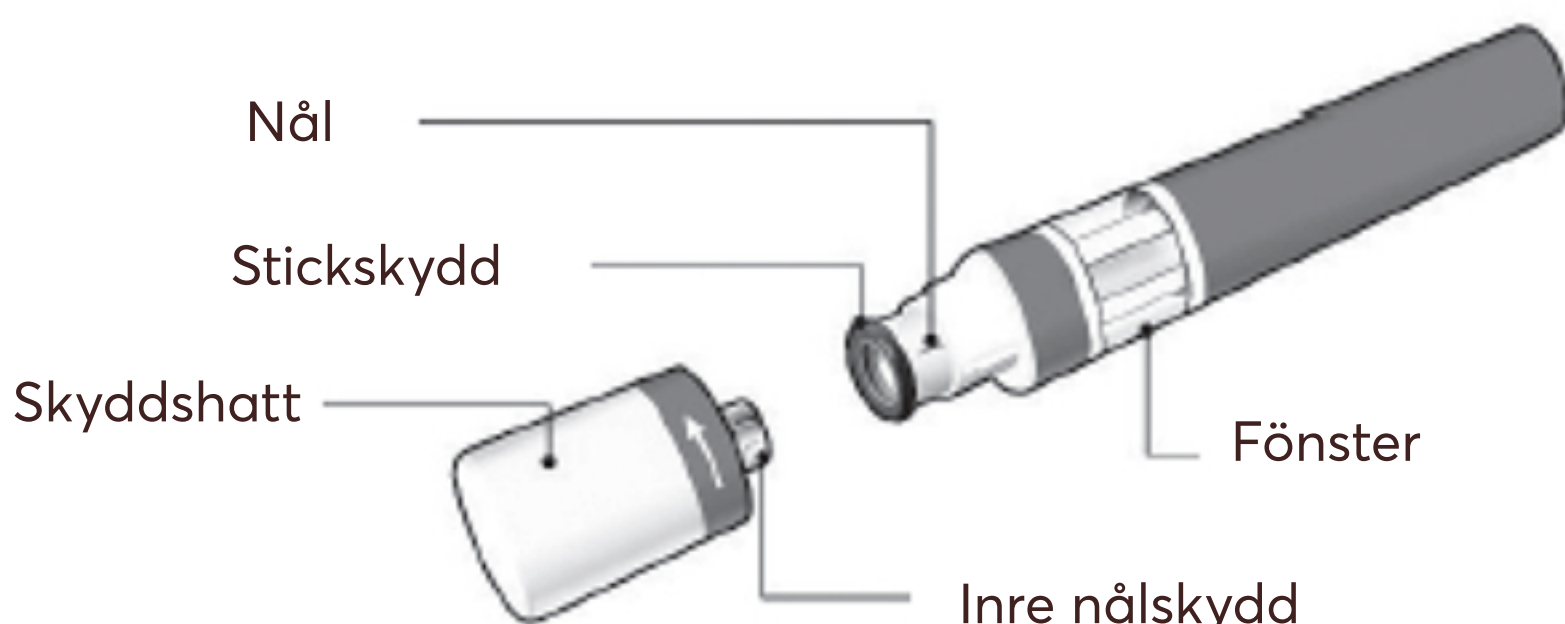


Kesimpta Sensoready-pennan visas med skyddshatten avtagen. **Ta inte** av skyddshatten förrän du är redo att injicera.

TILLBEHÖR SOM DU BEHÖVER FÖR INJEKTIONEN:

Ingår i förpackningen:

- En ny Kesimpta Sensoready-penna (**se bild B**)

Bild B

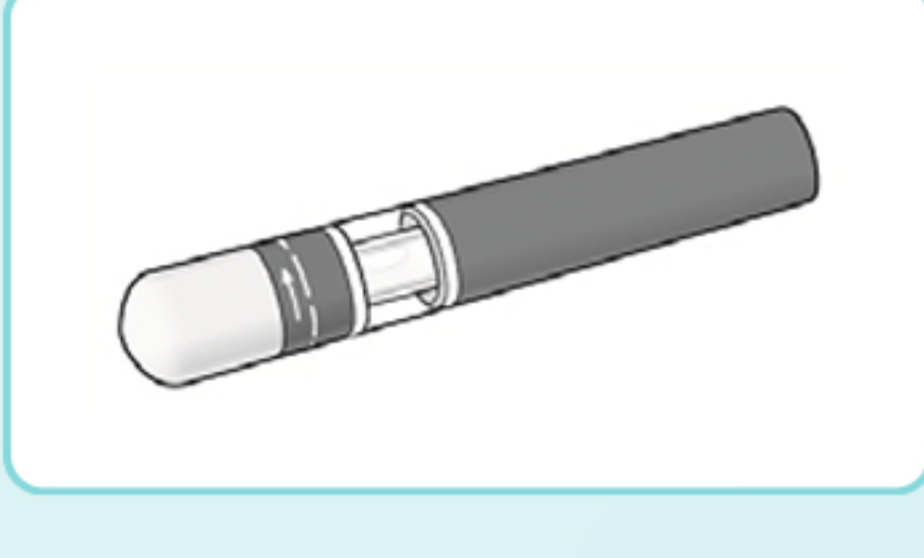

Ingår inte i förpackningen (**se bild C**):

- 1 spritsudd
- 1 bomullstuss eller kompress
- Behållare för riskavfall

Bild C



Se "Hur ska jag kassera en använd Kesimpta Sensoready-penna?" i slutet av denna bruksanvisning.

FÖRE INJEKTIONEN:


Ta ut injektionspennan ur kylskåpet **15 till 30 minuter före injektionen** så att injektionspennan uppnår rumstemperatur.

Steg 1. Viktig säkerhetskontroll innan du injicerar (se bild D):

- Titta i injektionspennans fönster. Vätskan ska vara klar till lätt opaliserande.
Använd inte om vätskan innehåller synliga partiklar eller är grumlig.
Eventuellt syns en liten luftbubbla, vilket är normalt.
- Kontrollera **utgångsdatumet (EXP)** på injektionspennan.
Använd inte injektionspennan om utgångsdatumet har passerats.

Kontakta apotekspersonal eller hälso- och sjukvårdspersonal om injektionspennan inte uppfyller dessa krav.

Bild D

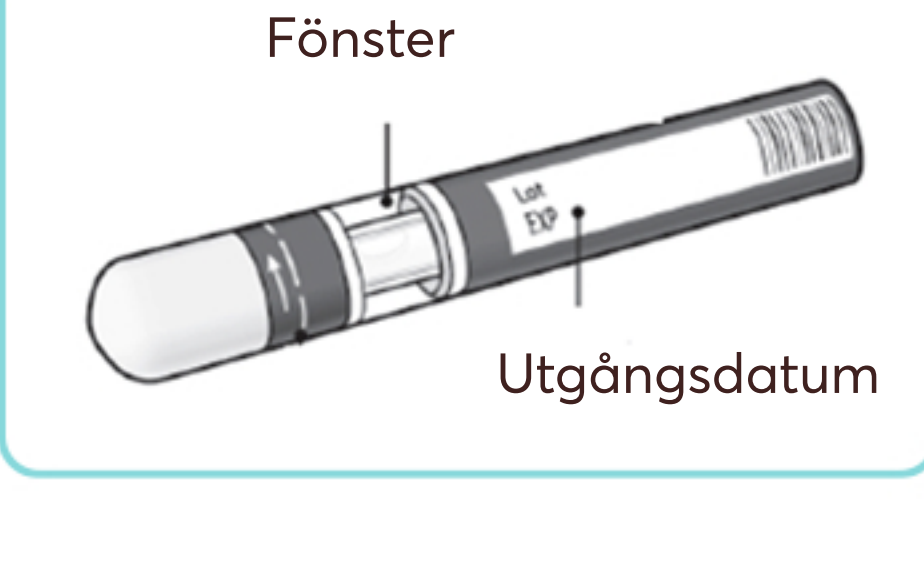

Steg 2. Välj injektionsställe:

- Rekommenderat injektionsställe är lårens framsida. Du kan också välja ett ställe på nedre delen av buken, men **inte** inom 5 cm från naveln (**se bild E**).
- Välj olika ställen varje gång du injicerar Kesimpta.
- **Injicera inte** i områden med blåmärken eller där huden är öm, röd, fjällande eller hård. Undvik områden som har ärr eller bristningar eller är infekterade.

- Om en **vårdare** eller **hälso- och sjukvårdspersonal** ger dig injektionen kan de även välja ett injektionsställe på överarmarnas utsida (**se bild F**).

Bild E


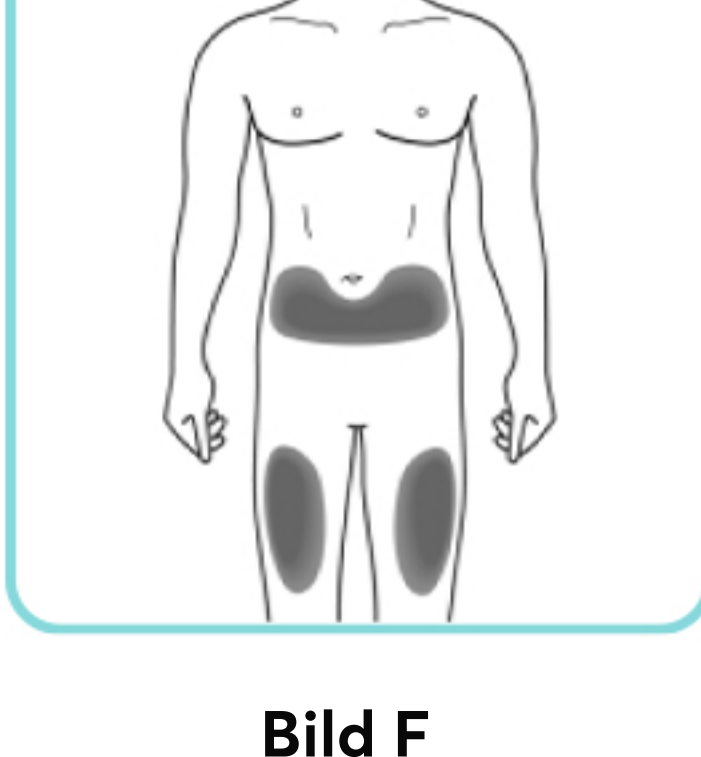


Bild F

(endast vårdare och hälso- och sjukvårdspersonal)

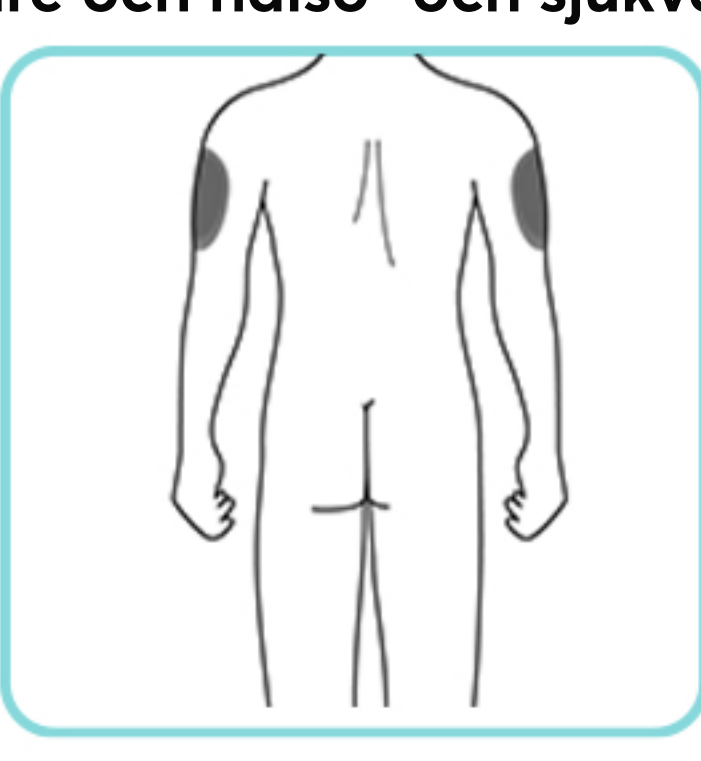

Steg 3. Rengör injektionsstället:

- Tvätta händerna med tvål och vatten.
- Rengör injektionsstället med en cirklande rörelse med spritsudden. Låt det torka innan du injicerar (**se bild G**).
- Rör inte vid det rengjorda området igen förrän du injicerar.

Bild G




INJEKTIONEN

Steg 4. Ta av skyddshatten:

- Ta inte av skyddshatten förrän du är redo att använda injektionspennan.
- Vrid av skyddshatten i pilens riktning (**se bild H**).
- Kassera skyddshatten. **Försök inte trä på skyddshatten igen.**
- Använd injektionspennan inom 5 minuter efter att skyddshatten har tagits av.

Det kan komma några droppar läkemedel ur nålen, vilket är normalt.

Bild H

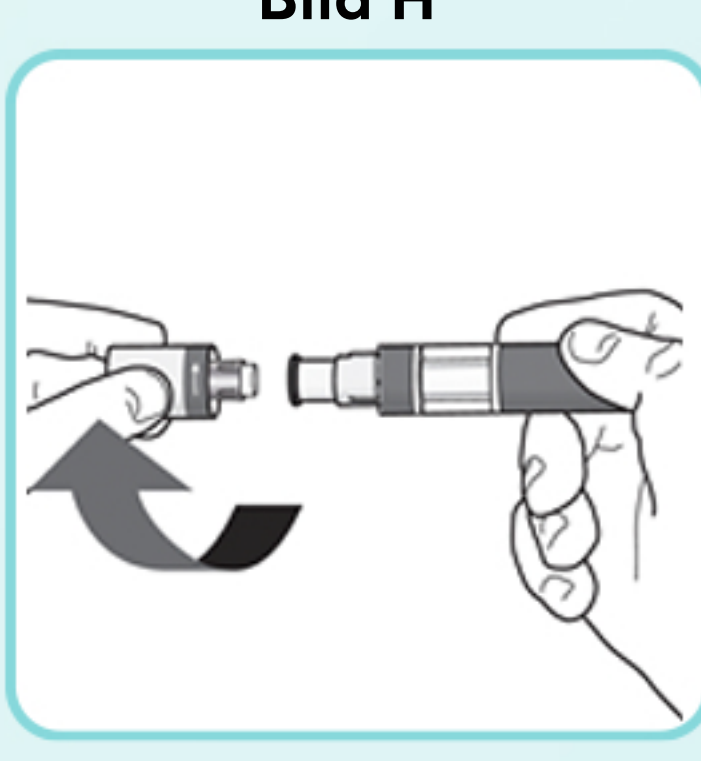


Steg 5. Så här håller du injektionspennan:

- Håll injektionspennan i 90 graders vinkel mot det rengjorda injektionsstället (**se bild I**).



Bild I

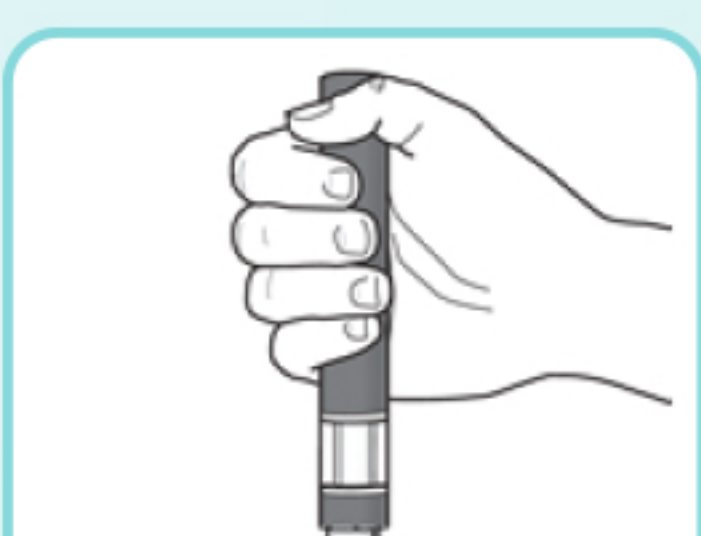

Viktigt! Under injektionen kommer du att höra **2 höga klickljud**:


- Det **första klickljudet** talar om att **injektionen har startat**.
- Det **andra klickljudet** talar om att **injektionen nästan är klar**.

Du måste fortsätta hålla injektionspennan stadigt mot huden tills du ser en **grön indikator** fylla fönstret och sluta röra sig.

Steg 6. Starta injektionen:

- Tryck injektionspennan stadigt mot huden för att starta injektionen (**se bild J**).
- Det **första klickljudet** talar om att injektionen har startat.
- **Fortsätt att trycka** injektionspennan stadigt mot huden.
- Den **gröna indikatorn** visar hur injektionen fortskrider.

Bild J

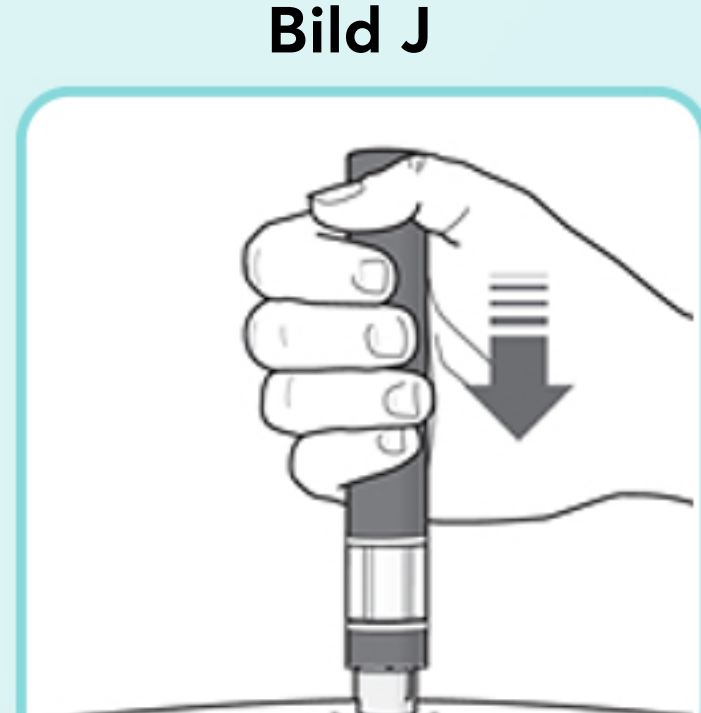

Steg 7. Slutför injektionen:

- Lyssna efter det **andra klickljudet**. Detta talar om att injektionen **nästan** är klar.
- Kontrollera att den **gröna indikatorn** fyller fönstret och har slutat röra sig (**se bild K**).
- Du kan nu ta bort injektionspennan (**se bild L**).

Bild K

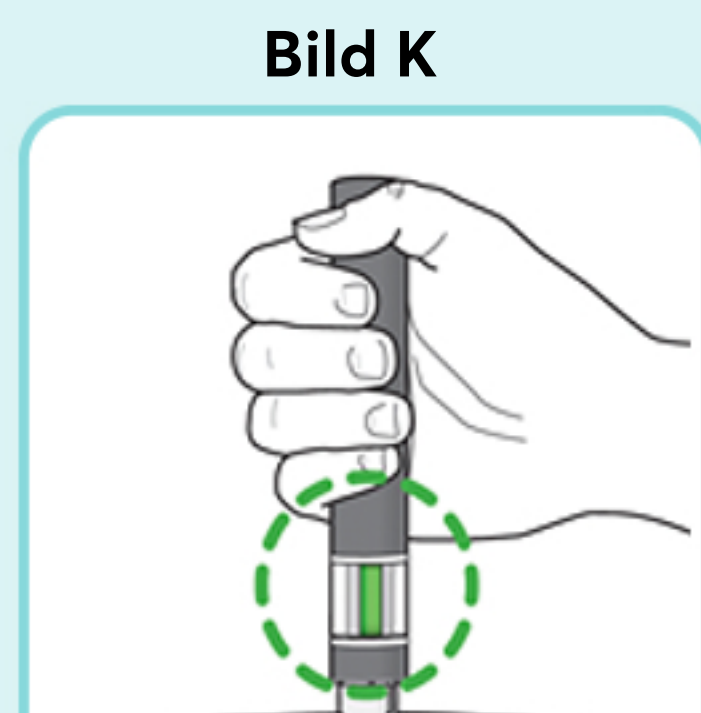


Bild L



EFTER INJEKTIONEN:

- Om den gröna indikatorn inte fyller fönstret betyder det att du inte har fått hela dosen. Kontakta läkare eller apotekspersonal om den gröna indikatorn inte syns.
- Det kan komma lite blod från injektionsstället. Du kan trycka en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället och hålla kvar den i 10 sekunder. Gnugga inte på injektionsstället. Om blödningsen fortsätter kan du sätta ett litet plåster på injektionsstället.

HUR SKA JAG KASSERA EN ANVÄND KESIMPTA SENSOREADY-PENNA?

Steg 8. Så här kasserar du en Kesimpta Sensoready-penna:

- Kasta den använda injektionspennan i en behållare för riskavfall (dvs. en punktionssäker, förslutningsbar behållare eller liknande) (**se bild M**).
- Försök aldrig återanvända injektionspennan.

Förvara behållaren med riskavfall utom räckhåll för barn.

Bild M



KESIMPTA (ofatumumab) Receptbelagt. Beredningsform: förfylld injektionspenna. **Indikation:** KESIMPTA är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom. Aktiv sjukdom i RMS är skov eller MRT (magnetisk resonanstomografi) som visar tecken på inflammation. **Dosering:** 20 mg injektion vecka 0, 1 och 2, följt av månadsvis dosering. **Kontraindikation:** Ta inte KESIMPTA om du är överkänslig mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, om du har kraftigt nedsatt immunförsvar, allvarlig aktiv infektion eller aktiv cancer. **Varning och försiktighet:** Injektionsrelaterade reaktioner kan uppkomma. Tala med läkare om du planerar att vaccinera dig då du inte ska få levande eller levande försvagade vacciner under tiden du behandlas med Kesimpta. Tala alltid med din läkare om du blir sämre i din MS-sjukdom eller får en allvarlig infektion. Du kan bli mer infektionskänslig eller en infektion du redan har kan förvärras. Infektioner kan bli allvarliga och till och med livshotande. Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod under pågående KESIMPTA-behandling och minst 6 månader efter avslutad behandling.

Läs bipacksedeln noga innan användning. Bipacksedeln uppdaterad: 2024-06-20

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE20241218_11332331